



Gebruiksaanwijzing








Aansluiten zuurstof op de myAIRVO 2

Deze instructie laat zien hoe u zuurstof aansluit op de myAIRVO 2.

Let op: Het is erg belangrijk dat er geen zuurstof kan ophopen in de myAIRVO 2. Als dit gebeurt kan er een storing optreden. Om dit te voorkomen is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in- en uitschakelen van de myAIRVO 2 en de zuurstof.

Inschakelen: schakel eerst de myAIRVO 2 in, zet daarna pas de zuurstofconcentrator aan.
Uitschakelen: schakel eerst de zuurstofconcentrator uit, zet daarna pas de myAIRVO 2 uit.

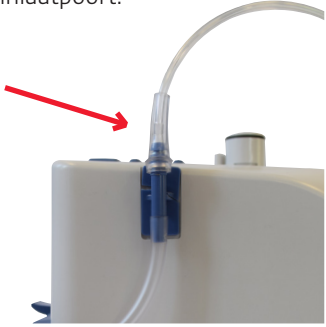Deze stappen staan eveneens beschreven op de achterzijde van deze kaart.

| | | |
|---|--|--|
| <p>1</p> <p>Dit is de zuurstof inlaat uitbreidingskit.</p>  | <p>2</p> <p>De zuurstof inlaat uitbreidingskit moet hier bevestigd worden.</p>  | <p>3</p> <p>Plak de zuurstof inlaat uitbreidingskit vast aan de daarvoor bestemde plek op de myAIRVO 2.</p>  |
| <p>4</p> <p>Duw het eind van de slang van de zuurstof inlaat uitbreidingskit aan de achterkant boven de filterhouder vast.</p>  | <p>5</p> <p>Plaats de slang van uw zuurstofconcentrator op de zuurstof inlaatpoort.</p>  |  <p>Westfalen Medical</p>  <p>Neem bij vragen of twijfel contact met ons op via 0570 - 248 895.</p> |




Gebruiksaanwijzing


In- en uitschakelen van de myAIRVO 2

Inschakelen

1 Schakel eerst de myAIRVO 2 in door op de aan/uitknop te drukken.




2 Zet nu de zuurstofconcentrator aan.

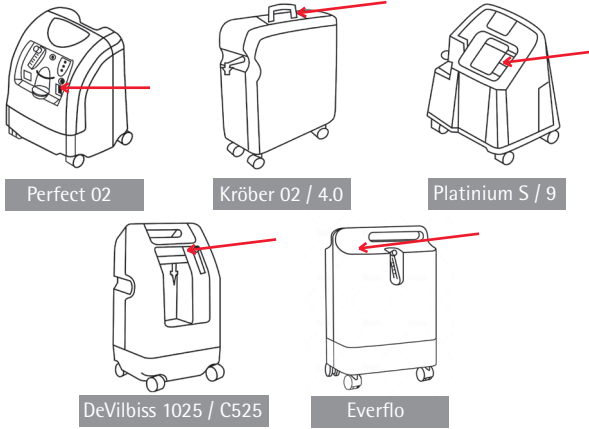

Perfect 02 Kröber 02 / 4.0 Platinum S / 9
DeVilbiss 1025 / C525 Everflo

Uitschakelen

1 Schakel eerst de zuurstofconcentrator uit.

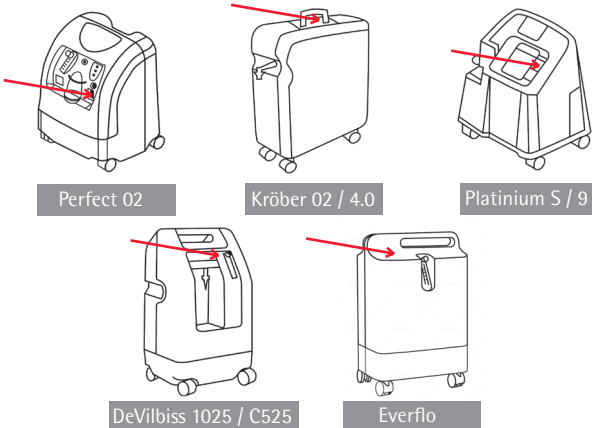

Perfect 02 Kröber 02 / 4.0 Platinum S / 9
DeVilbiss 1025 / C525 Everflo

2 Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om de myAIRVO 2 uit te zetten. De myAIRVO 2 zal eerst in droogmodus gaan. Zodra deze klaar is schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.

