

4. Verbruiksartikelen

Raadpleeg hoofdstuk 4, "Reinigen en onderhouden" van de myAIRVO 2-gebruikershandleiding voor informatie over verbruiksartikelen. De myAIRVO 2 heeft vier onderdelen die u regelmatig moet vervangen om het apparaat zo schoon mogelijk te houden. Voor het aantal keer dat hieronder wordt aanbevolen wordt ervan uitgegaan dat de myAIRVO 2 door slechts één persoon wordt gebruikt en dat de juiste reinigingsprocedures worden gevolgd.



60 **Optiflow™+-neuscanule**
Elke 60 dagen vervangen.
Productcode: MYOPT9SMALL (2-pack)
MYOPT9MEDIUM (2-pack)
MYOPT9LARGE (2-pack)



60 **AirSpiral™-slang**
Elke 60 dagen vervangen.
Productcode: MYAIRSPIRAL



90 **Luchtfilter**
Elke 90 dagen of na 1000 uur vervangen.
Productcode: 90OPT913 (2-pack)



N/A **HC360 herbruikbare waterkamer**
Productcode: HC360



Sommige producten zijn mogelijk niet in uw land beschikbaar.
Neem contact op met uw plaatselijke Fisher and Paykel Healthcare-vertegenwoordiger.

Contactgegevens voor ondersteuning en bestellingen

www.fphcare.com/myairvo


F&P, AirSpiral, myAIRVO en Optiflow zijn handelsmerken van Fisher & Paykel Healthcare Limited.

myAIRVO™ 2 Snelstartgids


Belangrijke opmerking: Dit is slechts een snelstartgids en is in geen geval een vervanging voor uw myAIRVO 2-gebruikershandleiding. Voordat u het myAIRVO 2-apparaat gaat gebruiken, dient u de myAIRVO 2-gebruikershandleiding door te lezen om het beoogd gebruik, de waarschuwingen en aandachtspunten van het apparaat te leren begrijpen. De myAIRVO 2 is niet bedoeld voor ondersteuning van vitale lichaamsfuncties.

1. Het apparaat installeren


Raadpleeg hoofdstuk 2, "De myAIRVO 2 instellen" en hoofdstuk 3, "De myAIRVO 2 gebruiken" van de myAIRVO 2-gebruikershandleiding voor informatie over het installeren.

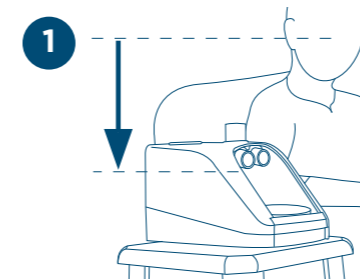


1 Zet de myAIRVO 2 op een lage plank of op de vloer naast uw bed. Zorg dat het apparaat lager dan uw hoofd en op een horizontale ondergrond wordt geplaatst.

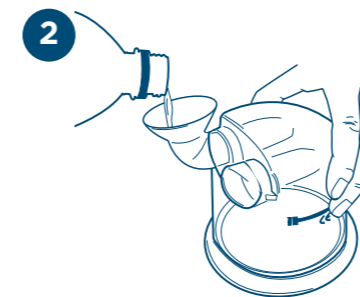


2 Vul de kamer met behulp van de meegeleverde trechter met voldoende gedestilleerd water voor de gebruiksperiode maar nooit tot boven de maximum vullijn van 560 mL.

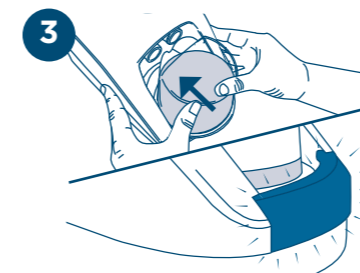

3 Sluit de waterkamer aan op het apparaat door de beschermrand omlaag te drukken en vooruit te duwen totdat deze vastklikt.

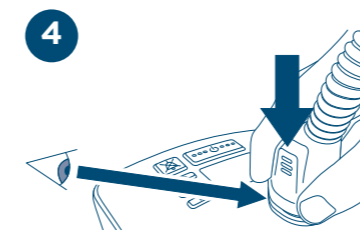

4 Sluit de beademingsslang aan op de myAIRVO 2.

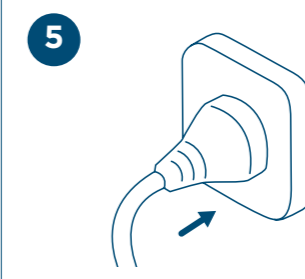

5 Sluit het netsnoer van de myAIRVO 2 aan op de achterkant van het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.




6 Schakel de myAIRVO 2 in door de Aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt te houden.

De myAIRVO 2 begint met opwarmen en er verschijnt een opwarmsymbool op het scherm.



7 Als de myAIRVO 2 klaar is voor gebruik, wordt er een vinkje weergegeven.

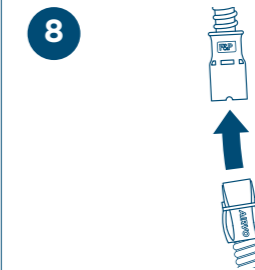


8 Sluit de interface aan en begin de therapie. Als er tijdens het gebruik veel condensatie in de slang ontstaat, raadpleeg dan Condensbeheersing in hoofdstuk 2, "De myAIRVO 2 instellen".

2. Het apparaat gebruiken

2.1 Knoppen

Raadpleeg hoofdstuk 3, "De myAIRVO 2 gebruiken" van de myAIRVO 2-gebruikershandleiding voor informatie over het gebruik van de myAIRVO 2.

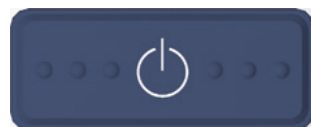

Aan/uit-knop

De myAIRVO 2 wordt ingeschakeld door de Aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt te houden. Houd deze knop na gebruik 3 seconden ingedrukt om naar de droogmodus te gaan. Uw apparaat zal na 99 minuten automatisch uitschakelen.



Geluidspauze-knop

Met de Geluidspauze-knop kunt u de geluidsalarmen tijdelijk onderdrukken.



Modus-knop

Met de Modus-knop kunt u door de modi bladeren:

- Temperatuur
- Flowsnelheid
- Dag/nacht
- Compliance




Omhoog- en Omlaag-knoppen

Met de knoppen Omhoog en Omlaag kunt u de instellingen in de volgende modi wijzigen:

- Temperatuur
- Flowsnelheid
- Dag/nacht


2.2 Modi en instellingen in de standaardmodus

Raadpleeg hoofdstuk 3, "De myAIRVO 2 gebruiken" van de myAIRVO 2-gebruikershandleiding voor informatie over het gebruik van de myAIRVO 2. De myAIRVO 2 onthoudt uw instellingen wanneer u het apparaat uitschakelt.

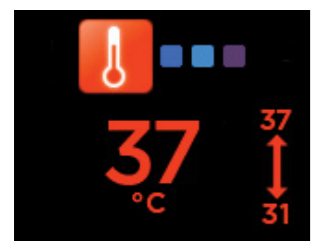

Temperatuurmodus

Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te wisselen tussen de volgende temperaturen: 31 °C, 34 °C en 37 °C.

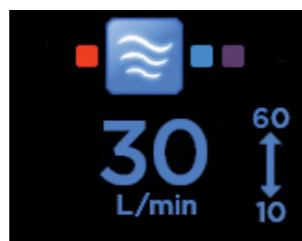


Flowsnelheidsmodus

Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om een flowsnelheid te selecteren van 10-60 L/min. Raadpleeg de myAIRVO 2-gebruikershandleiding voor informatie over flowbereiken voor uw interface.



Dag-/nachtmodus

Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te wisselen tussen Dagmodus en Nachtmodus. In de Nachtmodus worden sommige audiosignalen stiller en wordt uw scherm gedimd.

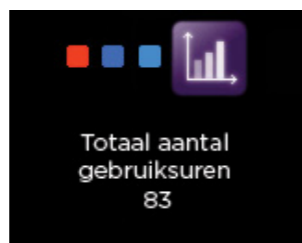

Compliance-modus



In de Compliance-modus wordt er automatisch tussen de statistieken van het apparaatgebruik gewisseld:

- Totaal aantal gebruiksuren
- Uren per dag
- Controlecijfer (voor het zorgpersoneel)

2.3 Alarmen

Raadpleeg hoofdstuk 3, "De myAIRVO 2 gebruiken" van de myAIRVO 2-gebruikershandleiding voor informatie over alarmen. De myAIRVO 2 heeft alarmen die u waarschuwen voor onderbrekingen in uw behandeling. Druk op de Geluidspauze-knop om het alarm 115 seconden te onderdrukken.

Geluidspauze-knop

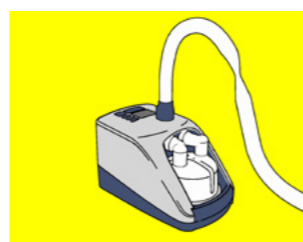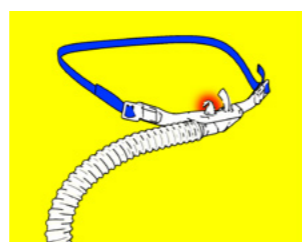

3. Het apparaat reinigen

Raadpleeg hoofdstuk 3, "De myAIRVO 2 gebruiken" en hoofdstuk 4, "Reinigen en onderhouden" van de myAIRVO 2-gebruikershandleiding voor informatie over het reinigen van de myAIRVO 2.


3.1 Dagelijkse reiniging

1




Verwijder na gebruik de interface. Houd vervolgens de Aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de 99 minuten durende droogmodus te starten. Draag de interface niet als het apparaat in de droogmodus staat om brandwonden te voorkomen en verwijder de waterkamer pas als de droogmodus is voltooid.

2

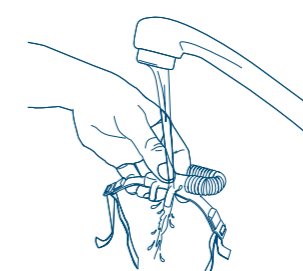

Spoel de interface af met drinkbaar water en sluit hem weer aan op de beademingsslang terwijl het apparaat nog in droogmodus is, zodat de interface kan drogen.

3

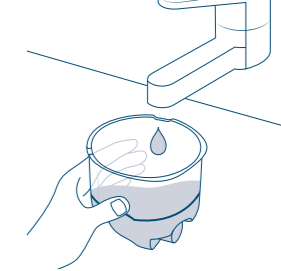

Verwijder de waterkamer nadat de droogmodusprocedure is voltooid door de beschermrand omlaag te duwen en de kamer naar buiten te trekken. Was de kamer, spoel hem af en vul hem vervolgens opnieuw volgens de installatiestappen op de vorige pagina.


3.2 Wekelijkse reiniging

1




Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2

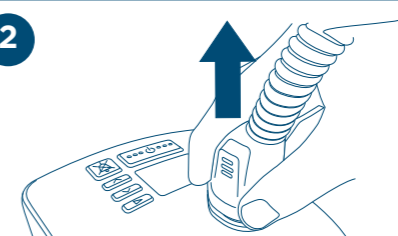


Verwijder de beademingsslang en voer overtollige condensatie af.

3

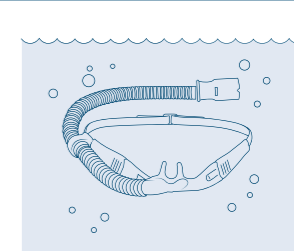


Maak de interface los van de beademingsslang, was hem in warm water met wat mild afwasmiddel, spoel hem met drinkbaar water en sluit hem weer aan op de beademingsslang.


4

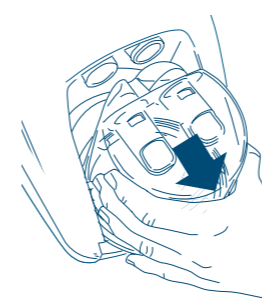

Verwijder de waterkamer. Laat eventueel resterend water weglopen. Verwijder de kamerbodem. Was de bovenkant van de kamer en de bodem met wat mild afwasmiddel en spoel ze daarna af. Laat de kamer 10 minuten in een oplossing van azijn (1 deel) en water (2 delen) liggen. Spoelen en drogen.

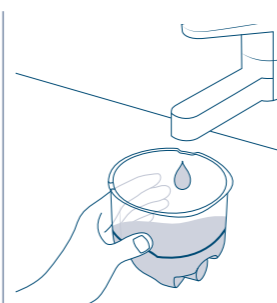

5

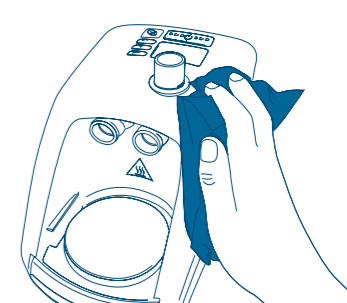

Veeg de binnenkant van de aansluitpoort voor de beademingsslang grondig schoon met een schone, pluivrije doek die in warm water met wat mild afwasmiddel is gedoopt. Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een schone, vochtige (niet natte) doek die in warm water met wat mild afwasmiddel is gedoopt.

Als de reiniging is voltooid, maakt u de myAIRVO 2 weer gereed aan de hand van de eerder beschreven installatiestappen.