


ResMed

AirFit™ 30 serie



Slapen in
je favoriete
houding!

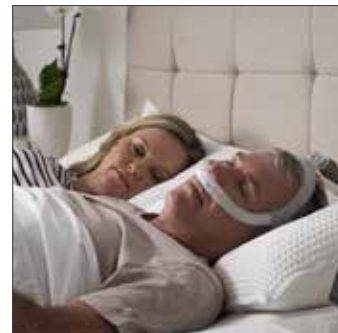

Ultracompact voor maximaal contact



AirFit™ N30i

Ultracompact neusmasker



AirFit™ P30i

Intranasaal masker



AirFit™ F30

Ultracompact volgeaatsmasker

Ultracompact design

Het onder de neus design van de AirFit N30i-, P30i- en F30-maskers bevrijdt de neusbrug en verruimt het gezichtsveld.

Bewegingsvrijheid

De bovenaansluiting van de N30i en de P30i zorgt ervoor dat de patiënt de slang die het masker met de machine verbindt vergeet en zonder hinder van zijde kan veranderen.

Stilte

Dankzij de QuietAir™-luchtafvoer hebben de AirFit P30i en F30 een geluidsniveau van slechts 21 dBA en verspreiden ze de lucht in stilte^{1,2,3,4}.

ResMed.com/AirFit 30



Elleboog met snelsluiting

Met 360° rotatie om de bewegingsvrijheid te verzekeren.

Zachte hoofdband

Voor een optimale afstelling en stabiliteit.

Ultracompact kussen voor onder de neus

Discreet, relativeert de perceptie van de patiënt en geeft een goede luchtdichtheid.

Stevige steun

Stabiliseert het kussen wanneer op het voorhoofd of de zijkant van het hoofd wordt gesteund, zelfs bij een patiënt met een onrustige slaap.

Membraan van silicone voor het septum

Voor een intuïtieve plaatsing en een stabiele⁵ luchtdichtheid aan het uiteinde van de neus.



Gebogen design

Het kussen volgt de vorm van de neus, met een overgang tussen een dik en stabiel membraan opzij en een fijner, comfortabeler membraan in het midden.

SpringFit™ frame

Automatische afstelling en een grote stabiliteit⁶ gedurende de hele nacht. Slechts twee maten benodigd.

Geïntegreerde hoezen

Maken het gebruik zacht en comfortabel⁵.

Intranasaal kussen

Uitgerust met een dubbele membraan heeft het intranasaal kussen een dubbele functie: een hoog niveau van comfort en een betrouwbare afdichting³. Het kussen sluit mooi aan in contact met de huid.



QuietAir-luchtafvoer⁷

Een geïntegreerd polyester filter in de luchtafvoer zorgt ervoor dat de uitgeademde lucht zachtjes wordt verspreid met een fluisterstil geluidsniveau – 21 dBA^{3,4}.




Modulariteit AirFit N30i/P30i

Gemeenschappelijke onderdelen

Frame (met elleboog)
63840 (STD)
63841 (SML)

Elleboog
63842

Hoofdband
63814

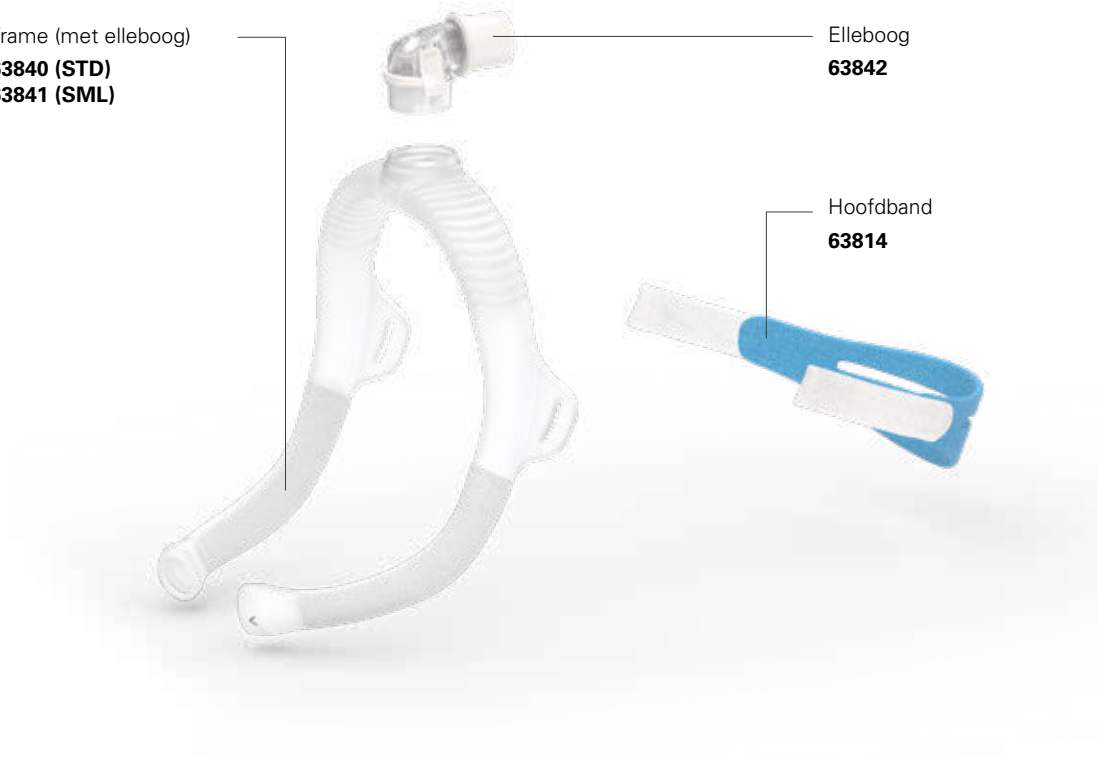

Specifieke onderdelen (uitwisselbaar)

AirFit N30i - onder de neus kussens

AirFit P30i - intranasale kussens

Kussen
63812 (W)
63810 (SW)
63811 (M)
63813 (S)

Kussen
63863 (L)
63862 (M)
63861 (S)




Model en referenties AirFit N30i/P30i


De AirFit N30i heeft 4 onderling verwisselbare kussenmaten: S, M, SW en W.

Dankzij het modulaire concept van de AirFit N30i passen deze vier kussens op het SpringFit frame. Men kan ze desgewenst dus vervangen voor meer flexibiliteit.

Wij raden aan het bij het masker geleverde model, afb. 1 hieronder, te gebruiken om voor de juiste maat te kiezen voor uw patiënt, zowel in de breedte als in de diepte.

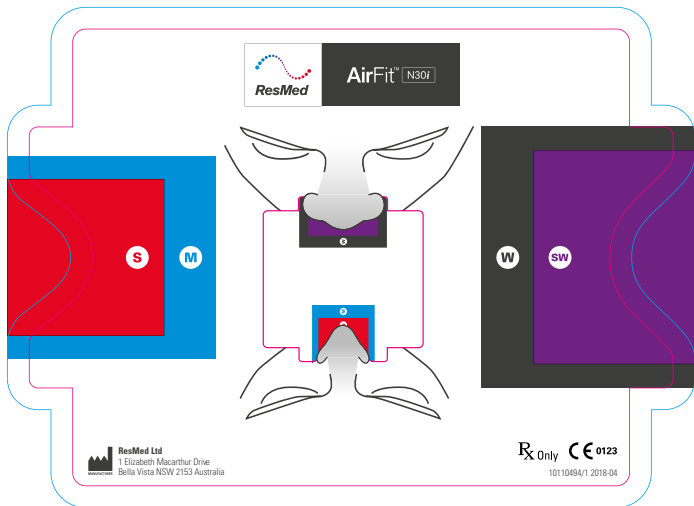

Afb. 1

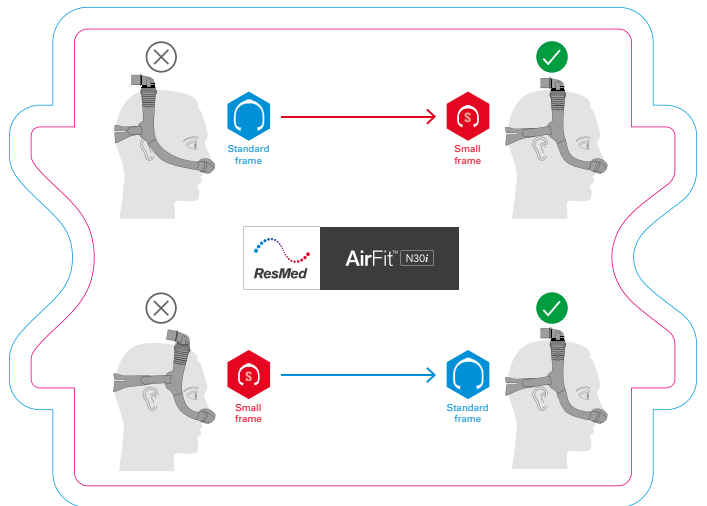

Afb. 2

Voor de keuze van het frame, Std of S, raadpleegt u de aanbevelingen bij afb. 2. Het frame moet halfverwege tussen het oog en het oor worden geplaatst, dit betreft zowel de N30i als de P30i.

AirFit N30i en P30i: slechts twee referenties

AirFit N30i Sml	63816
AirFit N30i Std	63815

AirFit P30i Sml	63866
AirFit P30i Std	63865

Met slechts twee framematen en slechts één hoofdband delen de AirFit N30i en P30i hetzelfde modulaire concept om uw voorraadbeheer te vereenvoudigen. Elk masker wordt met twee S en M kussens geleverd om een goede plaatsing voor de meeste patiënten⁵ te verzekeren. Andere kussenmaten zijn beschikbaar als optionele onderdelen om een oplossing voor iedereen te bieden: W en SW op de N30i; L op de P30i.

AirFit N30i S (63816) / AirFit P30i S (63866)

Inbegrepen:

- AirFit 30 S frame
- Hoofdband
- Twee kussens: S & M



AirFit N30i Std (63815) / AirFit P30i Std (63865)

Inbegrepen:

- AirFit 30 Std frame
- Hoofdband
- Twee kussens: S & M



Hoofdband


Eén enkele maat met aanpasbare bovenste riem.

Magneetclips

Snelle, gemakkelijke en intuïtieve plaatsing².

Elleboog met snelsluiting

Om gemakkelijk aan te sluiten/los te maken met een rotatie van 360°.

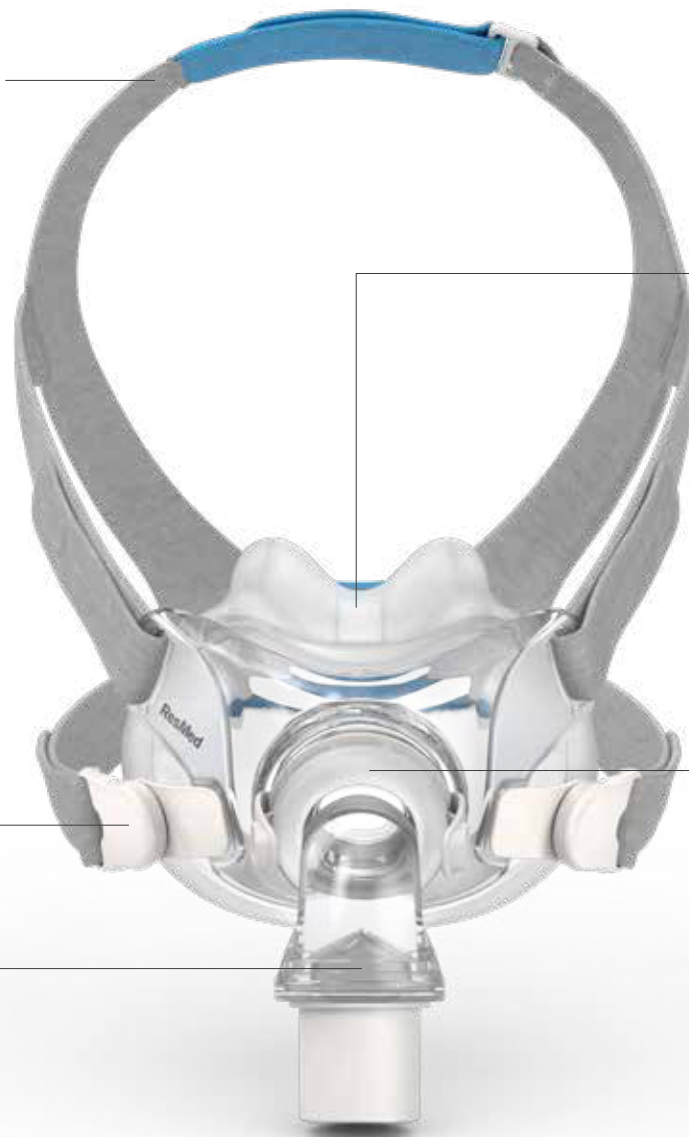

Ultracompact kussen voor onder de neus

Verzekert de stabiliteit², een open gezichtsveld en een kleiner contactvlak met het aangezicht.



QuietAir luchtafvoer⁷ 21 dBA


De luchtafvoer verwijdert de uitgedemde lucht met een minimum aan geluid en luchtstroom². Hij is geruislozer en verspreidt de lucht beter dan de belangrijkste concurrerende maskers op de markt¹.

AirFit F30 model en referenties

De AirFit F30 heeft 2 onderling verwisselbare kussenmaten: S en M.

Dankzij het modulaire concept van de AirFit F30 passen deze twee kussens op het frame. Men kan ze desgewenst dus vervangen voor meer flexibiliteit.

Wij raden aan het bij het masker geleverde model te gebruiken om voor elk van uw patiënten de juiste kussenmaat te kiezen.

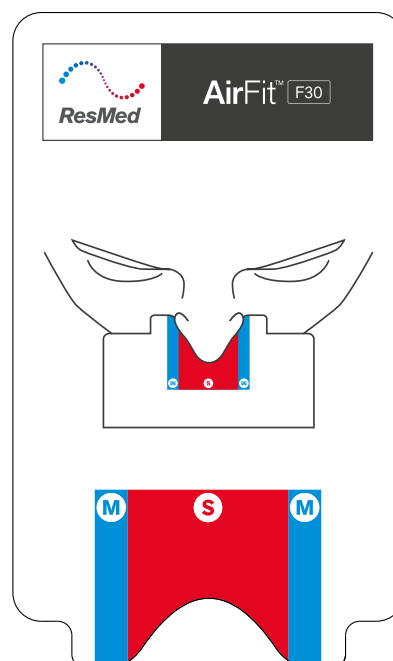

De AirFit F30 is verkrijgbaar in 2 packs met verschillende kussenmaten. Het pack S bevat een kussen S, het pack M een kussen M.

AirFit F30 S	64110
AirFit F30 M	64111

AirFit F30 kussen: InfinitySeal™ technologie zoals bij de AirFit F20
De technologie gebruikt een design, een textuur en een dikte die variëren volgens de zones van het gezicht van de patiënt waarop het masker rust.

Membraan van silicone voor het septum

Voor een intuïtieve plaatsing en een stabiele afdichting aan het uiteinde van de neus.

Mat silicone

De textuur is zachter aan het uiteinde van de neus, voor meer comfort in deze gevoelige zone.

Glad silicone

Dit gladdere gedeelte sluit naadloos aan op de huid en zorgt voor een goede afdichting, zelfs bij kaakbewegingen.

Comfort Stabiliteit



Zone onderaan de neus

Het kussen onder de neus is hier smaller en stabiliseert het contactvlak, voor meer luchtdichtheid en comfort.

Laterale ondersteuning


Een stevigere zone voor een neussteun die de luchtdichtheid en het comfort verzekert.

Omtrek van de kin


De dikte is ontworpen om de afdichting bij de kin te verbeteren en een goed comfort te verzekeren, met een minimale druk op de kaak en het tandvlees.

QuietAir
elleboog
63494


Standaard
elleboog
(in optie)
63476

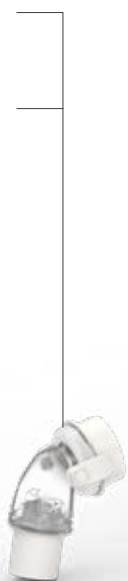

Frame
64159

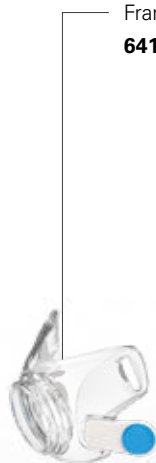

Kussen
64150 (S)
64151 (M)

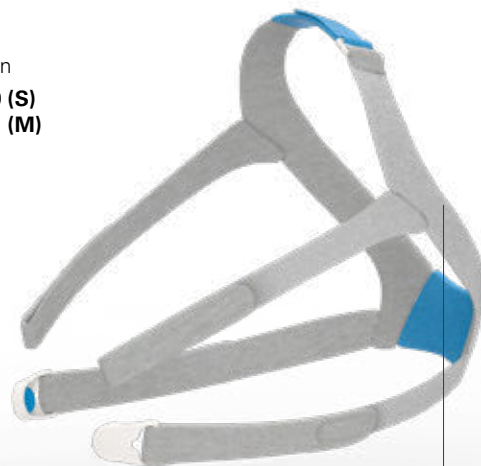

Hoofdband
64161



- 1 Vergelijking van de gegevens in de publieke gebruiksaanwijzing van het DreamWear volgelaatsmasker met het in interne tests gemeten akoestische vermogen van de AirFit F30, ID A4372624.
- 2 Externe klinische studie van ResMed van de AirFit F30, ID A4356449, gedurende 7 dagen bij 21 patiënten, april tot mei 2018.
- 3 Externe klinische studie van ResMed van de AirFit P30i, ID A4367859, gedurende 14 dagen bij 23 patiënten, mei tot juni 2018.
- 4 Akoestische vermogen van 21 dBA – Gebruiksaanwijzing AirFit P30i, ResMed Ltd 2018, ID A4461185.
- 5 Externe studie van de plaatsing van ResMed van de AirFit N30i, ID A4327753, gedurende 11 dagen bij 37 patiënten, april 2018.
- 6 Externe klinische studie van ResMed van de AirFit N30i, ID A4320645, gedurende 7 dagen bij 24 patiënten, februari tot maart 2018.
- 7 De QuietAir luchtafvoer is ontworpen voor herhaald gebruik door één enkele patiënt, thuis of in een medische omgeving.

Verdeeld door ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex, Frankrijk.

AirFit, InfinitySeal, SpringFit en QuietAir zijn gedeponeerde handelsmerken van ResMed Ltd. AirFit en AirSense zijn handelsmerken van ResMed Ltd.

De maskers AirFit F30, AirFit N30i en AirFit P30i zijn bedoeld voor patiënten die meer dan 30 kg wegen en aan wie een niet-invasieve behandeling met positieve druk is voorgeschreven, zoals een behandeling met CPAP of met twee drukniveaus. Ontworpen voor herhaald gebruik door één enkele patiënt thuis, of voor herhaald gebruik door meerdere patiënten in het ziekenhuis of in een medische omgeving.

© 2018 ResMed Ltd. 10111106/2 2019-04