




## Instructiekaart Homefill® compressor



zuurstofinfo.nl/  
downloads


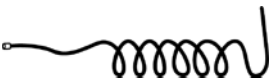
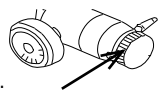

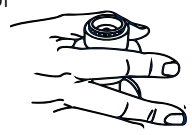

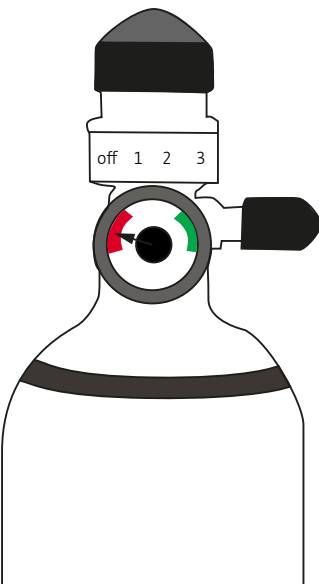
<p><b>1</b> Lees altijd de instructies.</p> 	<p><b>2</b> Geen open vuur. Niet roken. Ook geen e-smoker/vape.</p>  	<p><b>3</b> Gebruik geen olie en/of vethoudende producten.</p> 
<p><b>4</b> Ventileer de ruimte goed. Kijk voor advies op de meegeleverde ventilatiewijzer.</p> 	<p><b>5</b> Gebruik i.v.m. brandveiligheid geen elektrische apparaten die vonken kunnen opwekken in de ruimte waar de Homefill® staat en waar de cliënt aanwezig is.</p> 	<p><b>6</b> Plaats de Homefill® niet onder de kapstok of tegen de gordijnen. Dit i.v.m. verzadiging zuurstof.</p> 
<p><b>7</b> Er mogen geen verlengkabels worden gebruikt.</p> 	<p><b>8</b> Technisch onderhoud mag alleen verricht worden door de servicemedewerker.</p> 	<p><b>9</b> Storingen en/of vragen: Tel. 0570-858 450</p>  <p><b>Westfalen Medical</b></p>

Homefill  
compressor

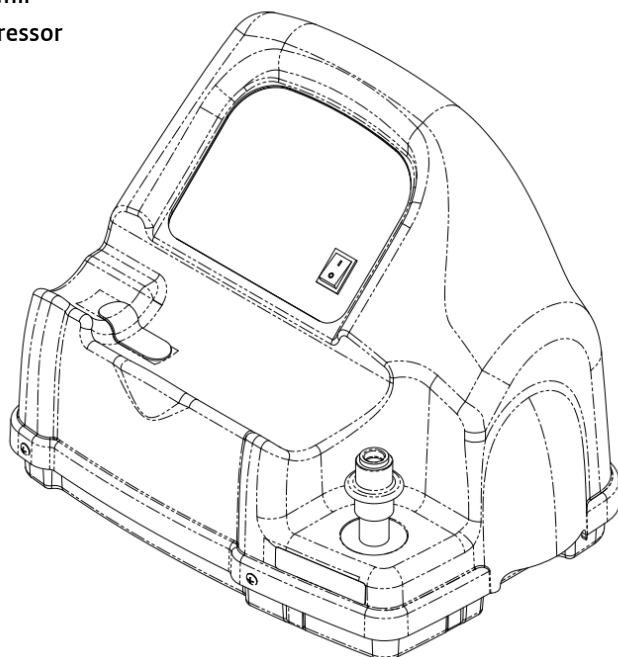



## Instructiekaart Homefill® cilinder

<p><b>1</b> Zet de concentrator aan d.m.v. de aan-uit knop.</p> <p>aan ● uit ○</p>	<p><b>2</b> Stel de flow in op de concentrator. <b>Let op:</b> Stel de flow niet hoger in dan: Perfect O2 2,5L/min Platinum S 2,5 L/min Platinum 9 6,5 L/min DeVilbiss C525 2,5L/min DeVilbiss 1025 7,5 L/min</p> 	<p><b>3</b> Verbind de Homefill® compressor, met de concentrator d.m.v. de gekrulde zuurstofslang.</p> 
<p><b>4</b> <b>LET OP!</b> De cilinder dient leeg te zijn, voor deze gevuld wordt. Ook stel je tijdens het vullen de flowmeter in op 0/off. De cilinder is leeg als deze in het rode vlak wijst.</p> 	<p><b>5</b> Controleer voor het aansluiten van de cilinder de huls op de Homefill® compressor of de groene stippen zichtbaar zijn. Zo niet, duw naar beneden.</p> 	<p><b>6</b> Klik de cilinder in de vulconnector, je hoort een duidelijke klik. De groene punten in de huls zijn nu niet meer zichtbaar.</p>
<p><b>7</b> Zet de Homefill® compressor aan.</p> <p>aan ● uit ○</p>	<p><b>8</b> Na het aansluiten van de cilinder kunt u de voortgang volgen door het aflezen van de LED-indicatoren. <b>LET OP!</b> Het kan een paar minuten duren voordat de compressor begint met vullen.</p>	<p><b>9</b> Is de cilinder vol? Zet de compressor uit. Hierna kan je deze afkoppelen door de ring van de vulconnector naar beneden te drukken.</p> 
<p><b>10</b> Storingen en/of vragen: Tel. 0570-858 450</p>  <p><b>Westfalen Medical</b></p>	<p><b>On demand cilinder</b></p>  <p><b>Continu cilinder</b></p> 