



Instructiekaart Vloeibaar vat en stroller



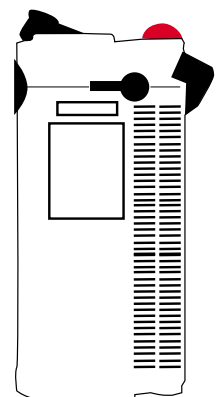
zuurstofinfo.nl/
downloads

1 Lees altijd de instructies. 	2 Geen open vuur. Niet roken. Ook geen e-smoker/vape.  	3 Gebruik geen olie en/of vethoudende producten. 
4 Ventileer de ruimte goed. Kijk voor advies op de meegeleverde ventilatiewijzer. 	5 Gebruik i.v.m. brandveiligheid geen elektrische apparaten die vonken kunnen opwekken in de ruimte waar het vloeibaar vat staat en waar de cliënt aanwezig is. 	6 Plaats het vloeibaar vat op een veilige plek zoals de servicemedewerker heeft aangegeven. Het vloeibaar vat moet altijd rechtop gebruikt worden. 
7 Plaats het vloeibaar vat niet onder de kapstok of tegen de gordijnen. Dit i.v.m. verzadiging zuurstof. 	8 Technisch onderhoud mag alleen verricht worden door de servicemedewerker. 	9 Raak geen koude of bevroren onderdelen aan van vaten en/of strollers. 
10 Storingen en/of vragen: Tel. 0570-858 450  Westfalen Medical		






Liberator vat

1. Indicatiemeter
2. Lekbakje
3. Vulnippel
4. Ontkoppelingsknop

Liberator stroller





<p>1 Stroller moet leeg zijn!</p>	<p>2 Maak de blauwe vulnippel aan de onderzijde droog met een pluisvrije theedoek. Druk ook NOOIT met uw handen op de blauwe vulnippel. Hieruit komt namelijk direct vloeibare zuurstof en dit kan brandwonden veroorzaken.</p>	<p>3 Zet de instellingen op de flowknop op '0'.</p>
<p>4 Duw de stroller stevig naar beneden, op de blauwe vulnippel, en houd deze positie tijdens de vulling aan.</p> 	<p>5 Haal de grijze vulhendel aan de achterzijde nu naar beneden, of haal de zwarte vulhendel naar links. U hoort nu een sissend geluid en dit betekent dat er gevuld wordt. Houd de vulhendel dan ook net zo lang vast totdat de stroller gevuld is.</p> 	<p>6 U ziet nu langzamerhand ook wolkjes zuurstof vrijkomen tijdens het vullen. Dit is heel normaal.</p> 
<p>7 Het sissende geluid gaat nu over in sputterend geluid, dit betekent dat de stroller vol is. Stop gelijk met vullen door de hendel los te laten en weer terug te duwen in de stroller. Haal de stroller er recht omhoog af door op de ontkoppelingsknop een goede klap te geven. Heeft u geen ontkoppelingsknop, dan recht omhoog eraf tillen zonder te wrikken.</p>	<p>8 Laat de stroller nu een half uur rechtop staan zodat de stroller op druk kan komen. Plaats het in de gootsteen in verband met lekkend water.</p> 	<p>9 Kijk na een half uur op de indicatiemeter hoe vol uw stroller is. Druk op de knop om te zien hoeveel lampjes er oplichten. Elk lampje vertegenwoordigd 12,5 % zuurstof in de stroller. Of gebruik de mechanische vloeistofpeilmeter (zie instructie 10).</p>
<p>10 Houd de zuurstofpeilmeter vast aan de stoffen band die zich bovenop de meter bevindt.</p> <p>Laat het apparaat stabiliseren en lees af hoeveel vloeibare zuurstof er volgens de gekleurde schaalverdeling ongeveer in zit.</p>		<p>11 Raak geen koude of bevroren onderdelen aan van vaten en/of strollers.</p> 