

## Gebruiksaanwijzing eFlow<sup>®</sup> rapid, Tolero, Altera en Zirela



vernevelaarinfo.nl/  
downloads/videos

De Tolero, Altera en Zirela vernevelaar krijgt u meegeleverd bij specifieke medicatie.

Gebruik deze vernevelaars uitsluitend voor de bijbehorende medicijnen. Vernevelt u wat anders, dan moet dit in de eFlow<sup>®</sup> rapid vernevelaar worden verneveld.

### In elkaar zetten

- Plaats de aerosolproductie-eenheid (D) in het medicatiereservoir/mesh (C). Let op: raak hierbij het metalen gedeelte in het midden van de aerosolproductie-eenheid (D) niet aan.
- Plaats het inademventiel (E) in de vernevelkamer (F).
- Sluit nu de vernevelkamer (F) op het medicatiereservoir/mesh (C).
- Pak het mondstuk (G) en sluit deze aan op de vernevelkamer. Indien u antibiotica vernevelt, plaats dan de Pari Filter/Valve Set tussen de vernevelkamer (F) en het mondstuk (G). Gebruik in dit geval het mondstuk zonder een blauw uitademingsventiel (zie afbeelding 1).
- Het geheel kan nu worden vastgeklemd aan het vernevelaarsnoer (B) die aan de besturingseenheid (eBase) is gekoppeld.
- Schenk de medicatievloeistof in het medicatiereservoir/mesh (C) en sluit af met de dekseldichting (I) en afsluitkap (H).

### Vernevelen

- Ventileer de ruimte waarin vernevelt wordt goed.
- Probeer te voorkomen dat er te veel mensen in de ruimte aanwezig zijn tijdens het vernevelen.
- Sluit de eBase aan op het netstroom of gebruik batterijen.
- Zorg ervoor dat u goed rechtop zit.
- Sluit uw lippen goed rond het mondstuk.
- Zet de vernevelaar aan. Het groene led lampje gaat branden en er klinkt eenmalig een signaal.
- Houd de vernevelaar rechtop.
- Apparaat schakelt zichzelf uit bij einde behandeling en er zal een vinkje op de besturingseenheid (eBase) verschijnen.

Er mag een kleine hoeveelheid medicatie achterblijven.

**Let op:** Bij gebruik van verschillende medicatie in de eFlow<sup>®</sup> rapid, de onderdelen tussendoor grondig afspoelen.

### Verneveltijd

Circa 5 minuten.

### Levensduur vernevelaar en toebehoren


6 maanden, bij gebruik van eFlow<sup>®</sup> rapid.

### Netstroom of batterijen

- Voor netstroom is er een netstroomkabel bijgeleverd.
- Batterijen: 4 x 1,5 V mignon (AA LR6/alkaline).
- Gebruik nieuwe batterijen of gebruik de adapter voor netstroom.
- Oplaadbare batterijen: 4 x 1,2 V mignon (AA rechargeable, min. 2500 mAh).
- Oplaadbare batterijen laden niet op in dit apparaat.



eFlow<sup>®</sup> rapid eBase

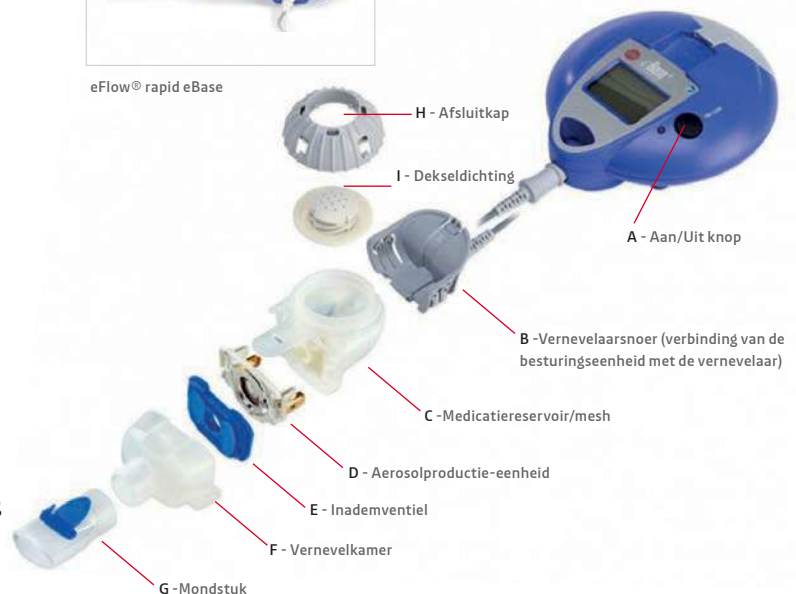

01



Bij gebruik van antibiotica gebruikt u de Pari Filter/Valve Set om te voorkomen dat bij uitademing medicatie in de ruimte komt. Dit ter bescherming van de mensen om u heen.



## Schoonmaakinstructie eFlow<sup>®</sup> rapid, Tolero, Altera en Zirela

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze goed schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

### Besturingseenheid/eBase en vernevelsnoer

1x per week afnemen met een licht vochtige doek.

### Vernevelaar (na iedere vernevelbeurt)

- Ontkoppel het vernevelaarsnoer van de vernevelaar.
- Haal alle onderdelen uit elkaar (ook de deksel en de Pari filter/Valve Set).
- Giet overtollige medicatie uit het reservoir.
- Spoel de vernevelaar goed af onder handwarm kraanwater. **Let op:** maak de aerosolproductie-eenheid nooit met een borstel of andere voorwerpen schoon.
- Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm kraan met 3 druppels afwasmiddel.
- Spoel alle onderdelen nog éénmaal af onder handwarm kraanwater zodat alle zeepresten worden verwijderd.
- Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone, pluisvrije theedoek.



**Let op!** Gebruik de Easycare nooit vaker dan 2x per week. Dit heeft een averechts effect op de verneveltijd.

**Let op!** De aerosolproductie-eenheid mag alleen aan de zijkanalen worden vastgepakt.

### Easycare (1x per week gebruiken)

- Klik de Easycare open (**zie afb. 1**).
- Klik de aerosolproductie-eenheid in de Easycare (**zie afb. 2**).
- Klik de Easycare dicht.
- Sluit de Easycare aan op het vernevelaarsnoer.
- Spuit circa 5 ml steriel water in de opening (gedestilleerd water en 2 spuitjes zijn meegeleverd).
- Zet de eBase aan gedurende tenminste 10 minuten.
- De eBase schakelt uit wanneer het spoelen klaar is.
- Na uitzetten kan er verneveldamp uit de opening komen. Dit is normaal.
- Verwijder het vernevelaarsnoer.
- Open de Easycare en verwijder de aerosolproductie-eenheid.
- Laat de overgebleven vloeistof uit de Easycare lopen.

### Na ieder gebruik van de Easycare

- Reinig de Easycare met handwarm kraanwater en mild afwasmiddel.
- Opende klapt laten drogen aan de lucht.
- Kook de Easycare nooit uit!

Kook de medicatiereservoir/mesh uit of reinig deze in de sterilisator nadat u de Easycare gebruikt heeft.

### Vernevelaar (1x per week)

- Voer eerst alle bovenstaande stappen uit.
- Alle onderdelen moeten worden uitgekookt.
- Breng een pan met kraanwater aan de kook.
- Leg, nadat het water kookt, alle onderdelen in de pan. Zorg ervoor dat de onderdelen de bodem van de pan niet raken. Hierdoor kan het gaan smelten.
- Laat alles 5 minuten koken.
- Haal de onderdelen voorzichtig uit de pan en schud het overtollige water eraf.
- Laat de onderdelen aan de lucht drogen op een schone, pluisvrije theedoek.