

Gebruiksaanwijzing eFlow[®] rapid, Tolero, Altera en Zirela



vernevelaarinfo.nl/
downloads/videos

De Tolero, Altera en Zirela vernevelaar krijgt u meegeleverd bij specifieke medicatie.

Gebruik deze vernevelaars uitsluitend voor de bijbehorende medicijnen. Vernevelt u wat anders, dan moet dit in de eFlow[®] rapid vernevelaar worden verneveld.

In elkaar zetten

- Plaats de aerosolproductie-eenheid (4b) in het medicatiereservoir (4a). **Let op:** raak hierbij het metalen gedeelte in het midden van de aerosolproductie-eenheid (4b) niet aan.
- Plaats het inademventiel (4c) in de vernevelkamer (4d).
- Sluit nu de vernevelkamer (4d) op het medicatiereservoir/mesh (4a).
- Pak het mondstuk (5) en sluit deze aan op de vernevelkamer. Indien u antibiotica vernevelt plaats dan de Pari Filter/Valve Set tussen de vernevelkamer en het mondstuk. Gebruik in dit geval het mondstuk zonder een blauw uitademingsventiel (zie afb. A).
- Het geheel kan nu worden vastgeklemd aan het vernevelaarsnoer (2) die aan de besturingseenheid (eBase) is gekoppeld.
- Schenk de medicatievloeistof in het medicatiereservoir/mesh (4a) en sluit af met de dekseldichting (3b) en afsluitkap (3a).

Vernevelen

- Ventileer de ruimte waarin vernevelt wordt goed.
- Probeer te voorkomen dat er te veel mensen in de ruimte aanwezig zijn tijdens het vernevelen.
- Sluit de eBase aan op het netstroom of gebruik de accu.
- Zorg ervoor dat u goed rechtop zit.
- Sluit uw lippen goed rond het mondstuk.
- Zet de vernevelaar aan: de besturingseenheid (eBase) start en vernevelt na een aftelling van 3 naar 0.
- Houd de vernevelaar rechtop.
- Apparaat schakelt zichzelf uit bij einde behandeling en er zal een vinkje op de besturingseenheid (eBase) verschijnen.

Er mag een kleine hoeveelheid medicatie achterblijven.

Let op: Bij gebruik van verschillende medicatie in de eFlow[®] rapid, de onderdelen tussendoor grondig afspoelen.



Bij gebruik van antibiotica gebruikt u de Pari Filter/Valve Set om te voorkomen dat bij uitademing medicatie in de ruimte komt. Dit ter bescherming van de mensen om u heen.

Verneveltijd


Circa 5 minuten.

Levensduur vernevelaar en toebehoren

6 maanden, bij gebruik van eFlow[®] rapid.

Netstroom of accu

- Voor netstroom is er een netstroomkabel bijgeleverd.
- Gebruik de netstroomkabel om de accu van de eBase op te laden of om direct mee te vernevelen.

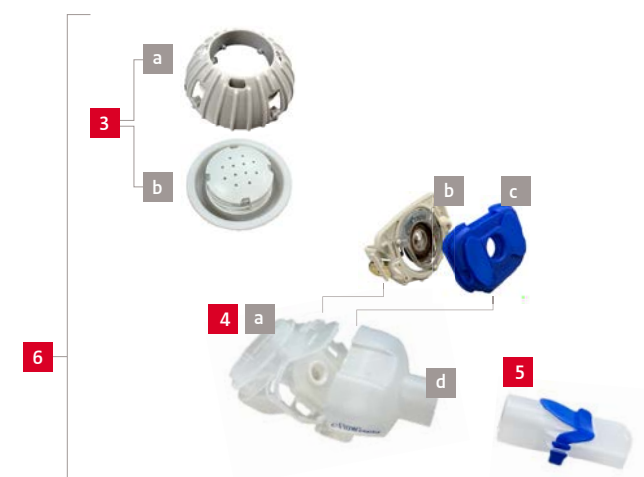



Schoonmaakinstructie eFlow[®] rapid, Tolero, Altera en Zirela

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze goed schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

Besturingseenheid/eBase en vernevelsnoer

1x per week met een licht vochtige doek schoonmaken.

Vernevelaar (na iedere vernevelbeurt)

- Ontkoppel het vernevelaarsnoer van de vernevelaar.
- Haal alle onderdelen uit elkaar (ook de deksel en de Pari filter/Valve Set).
- Giet overtollige medicatie uit het reservoir.
- Spoel de vernevelaar goed af onder handwarm kraanwater. **Let op:** maak de aerosolproductie-eenheid nooit met een borstel of andere voorwerpen schoon.
- Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm kraanwater met 3 druppels afwasmiddel.
- Spoel alle onderdelen nog éénmaal af onder handwarm kraanwater zodat alle zeepresten worden verwijderd.
- Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone, pluisvrije theedoek.



Let op! Gebruik de Easycare nooit vaker dan 2x per week. Dit heeft een averechts effect op de verneveltijd.

Let op! De aerosolproductie-eenheid mag alleen aan de zijkanen worden vastgepakt.

Easycare (1x per week gebruiken)

- Klik de Easycare open (**zie afb. B**).
- Klik de aerosolproductie-eenheid in de Easycare (**zie afb. C**).
- Klik de Easycare dicht.
- Sluit de Easycare aan op het vernevelsnoer.
- Spuit circa 5 ml steriel water in de opening (gedestilleerd water en 2 spuitjes zijn meegeleverd).
- Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt totdat het Easycare logo verschijnt.
- De eBase schakelt uit wanneer het spoelen klaar is.
- Na uitzetten kan er verneveldamp uit de opening komen. Dit is normaal.
- Verwijder het vernevelsnoer.
- Open de Easycare en verwijder de aerosolproductie-eenheid.
- Laat de overgebleven vloeistof uit de Easycare lopen.

Na elk gebruik van de Easycare

- Reinig de Easycare met handwarm kraanwater en een mild afwasmiddel.
- Opende klapt laten drogen aan de lucht.
- Kook de Easycare nooit uit!

Kook de medicatiereservoir/mesh uit of reinig deze in de sterilisator nadat u de Easycare gebruikt heeft.

Vernevelaar (1x per week)

- Voer eerst alle bovenstaande stappen uit.
- Alle onderdelen moeten worden uitgekookt.
- Breng een pan met kraanwater aan de kook.
- Leg, nadat het water kookt, alle onderdelen in de pan. Zorg ervoor dat de onderdelen de bodem van de pan niet raken. Hierdoor kan het gaan smelten.
- Laat alles 5 minuten koken.
- Haal de onderdelen voorzichtig uit de pan en schud het overtollige water eraf.
- Laat de onderdelen aan de lucht drogen op een schone, pluisvrije theedoek.