



Gebruiksaanwijzing PARI TurboBOY SX met LC Sprint



[westfalenmedical.com/
downloads](http://westfalenmedical.com/downloads)

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

In elkaar zetten

- › Plaats het mondstuk op de vernevelaar. Zorg dat het blauwe uitademventiel aan de bovenzijde zit.
- › Sluit de slang aan de onderkant van de vernevelaar aan. Plaats het andere uiteinde van de slang in de Pari Boy Classic.
- › Plaats de stekker in het stopcontact.

Vernevelen

- › Maak het klepje aan de bovenkant van de vernevelaar open en giet hier de medicatievloeistof in.
- › Zorg ervoor dat u goed rechtop zit.
- › Sluit uw lippen goed rond het mondstuk.
- › Plaats uw mond niet over het uitademingsventiel van het mondstuk (blauw).
- › Houd de vernevelaar rechtop.
- › Adem rustig en diep in en adem onspannen uit.
- › De behandeling is klaar als er geen nevel meer uit de vernevelaar komt.


Er mag een kleine hoeveelheid medicatie achterblijven.

Merkt u dat het vernevelen langer duurt? Maak dan uw vernevelaar volledig schoon aan de hand van de schoonmaakinstructies.

Ademt u te snel? Dan komt het PARI LC SPRINT PIF control systeem in actie! Dit is een geïntegreerde trainingstoel die het aanleren van een effectieve inhaleer techniek ondersteunt. Bij een te snelle of harde inademing, wordt het klepje **(a)** naar beneden getrokken, waardoor de opening **(b)** gesloten wordt. Hierdoor wordt u gedwongen om anders te gaan ademen.

Verneveltijd

Circa 5 tot 8 minuten (afhankelijk van druppelgrootte).

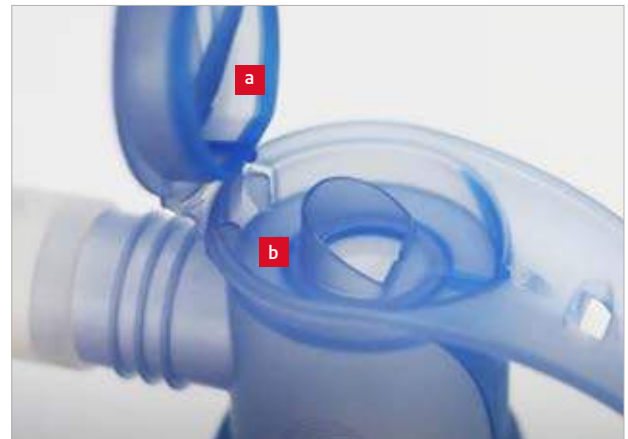



Schoonmaakinstructie PARI TurboBOY SX met LC Sprint

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze goed schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

Compressor en vernevelslang

- › 1x per week afnemen met een lichtvochtige doek.
- › Haal na elke vernevelbeurt de vernevelaar van de slang en zet de compressor aan. Hierdoor wordt het vocht uit de slang geblazen.

Filter compressor

1x per 2 weken controleren op vervuiling.

Vernevelaar (na iedere vernevelbeurt)

- › Ontkoppel de vernevelaar van de vernevelslangen.
- › Haal alle onderdelen uit elkaar.
- › Spoel alle onderdelen goed af onder handwarm kraanwater.
- › Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm kraanwater met 3 druppels mild afwasmiddel.
- › Borstel forse vervuiling eraf met een zachte (baby) tandenborstel.
- › Spoel alles af onder warm kraanwater.
- › Schud het overtollige water eraf.
- › Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone pluisvrije theedoek.

Vernevelaar (1x per week)

- › Voer altijd eerst bovenstaande handelingen uit.
- › Alle onderdelen moeten vervolgens worden uitgekookt.
- › Breng een pan met ruim kraanwater aan de kook. (Het gebruik van een magnetronsterilisator voor babyflessen is ook toegestaan)
- › Leg, nadat het water kookt, alle onderdelen in de pan. Zorg ervoor dat de onderdelen de bodem van de pan niet raken. Hierdoor kan het gaan smelten.
- › Laat alles 5 minuten koken.
- › Haal de onderdelen voorzichtig uit de pan en schud het overtollige water eraf.
- › Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone pluisvrije theedoek.

Jaarlijks onderhoud

Westfalen Medical komt 1x per jaar langs om de compressor te meten en het filter te vervangen.



01. Afspoelen onder handwarm kraanwater.



02. Wassen met drie druppels mild afwasmiddel.



03. Afspoelen onder handwarm kraanwater.



04. Uitkoken, 5 minuten of steriliseren in een sterilisator.