

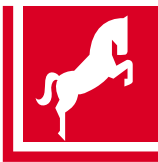


Instructiekaart Zuurstofcilinder met geïntegreerd reduceerventiel

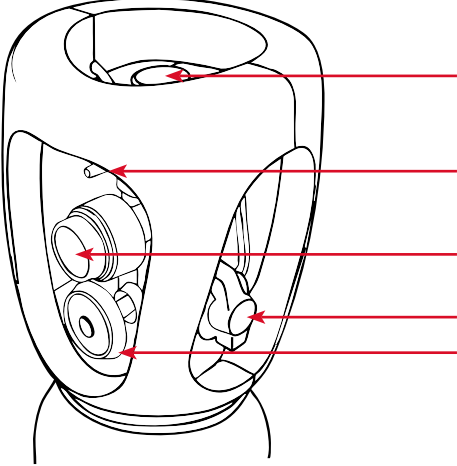


Instructievideo

<p>1 Lees altijd de instructies.</p> 	<p>2 Geen open vuur. Niet roken. Ook geen e-smoker/vape.</p> 	<p>3 Gebruik geen olie en/of vethoudende producten.</p> 
<p>4 Ventileer de ruimte goed. Kijk voor advies op de meegeleverde ventilatiewijzer.</p> 	<p>5 Gebruik i.v.m. brandveiligheid geen elektrische apparaten die vonken kunnen opwekken in de ruimte waar de cilinder staat en de cliënt is.</p> 	<p>6 Zet de zuurstofcilinder altijd vast en rechtop.</p> 
<p>7 Maximale lengte verbindingsslang.</p> 	<p>8 Ervaart u geen flow? Controleer de flow door de neusbril en/of slang te plaatsten in een glas water. Bij geen bubbels, slang nalopen en de flowmeter controleren. Bij nog geen flow contact opnemen met Westfalen Medical.</p> 	<p>9 Storingen en/of vragen: Tel. 0570-858 450</p>  <p>Westfalen Medical</p>



Gebruiksaanwijzing Geïntegreerd reduceerventiel



Flowknop

Tule

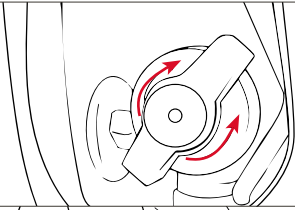
DIN aansluiting

Hoofdafsluiter

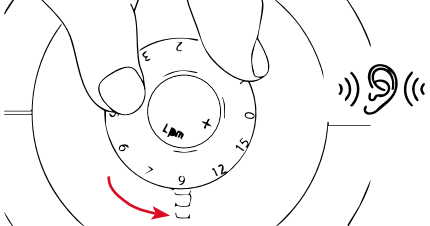
Indicatiemeter

- 1**

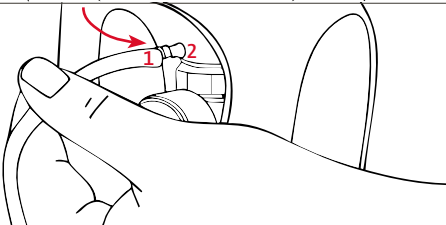
Draai de hoofdafsluiter open door in de richting van **OPEN** te draaien.
De indicatiemeter geeft nu aan hoeveel er nog in de cilinder zit. Staat de wijzer in het rode vlak, dan is hij leeg. Staat de wijzer in het groen, dan is hij vol.


- 2**

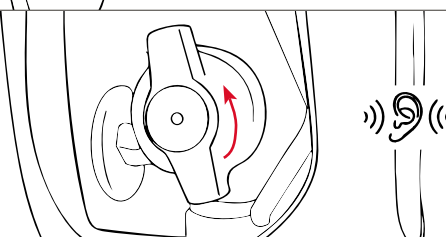
Draai de flowknop naar de voor u voorgeschreven flow (aantal liters per minuut). Draai de knop door tot de flow recht boven de tule zit.
Zodra u de flow instelt, hoort u een sissend geluid.


- 3**

Plaats de lange slang¹ op de tule² van de cilinder


- 4**

Als u klaar bent met het gebruik van de cilinder, draait u de hoofdafsluiter dicht door in de richting van **CLOSE** te draaien.
Na het afsluiten sist de cilinder nog na.


- 5**

Zodra het sissen is gestopt en de wijzer op de indicatiemeter in het rode vlak staat, draait u de flowknop weer terug naar 0.

