




Zuurstofcilinder met los reduceerventiel Instructiekaart



Instructievideo


<p>1 Lees altijd de instructies.</p> 	<p>2 Geen open vuur. Niet roken. Ook geen esmoker/vape.</p> 	<p>3 Gebruik geen olie en/of vethoudende producten.</p> 
<p>4 Ventileer de ruimte goed. Kijk voor advies op de meegeleverde ventielatiewijzer.</p> 	<p>5 Gebruik i.v.m. brandveiligheid geen elektrische apparaten die vonken kunnen opwekken in de ruimte waar de cilinder staat en de cliënt is.</p> 	<p>6 Zet de zuurstofcilinder altijd vast en rechtop.</p> 
<p>7 Maximale lengte verbindingsslang.</p> 	<p>8 Ervaart u geen flow? Controleer de flow door de neusbril en/ of slang te plaatsten in een glas water. Bij geen bubbels, slang nalopen en de flowmeter controleren. Bij nog geen flow contact opnemen met Westfalen Medical.</p> 	<p>9 Storingen en/of vragen: Tel. 0570-858 450</p>  <p>Westfalen Medical</p>

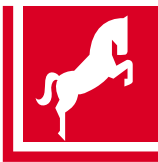


Reduceerventiel Plaatsen / wijzigen

Plaatsen reduceerventiel


- 1** Schroef het reduceerventiel (handvast) op de cilinder.
Let hierbij op dat uw handen schoon en vetvrij zijn.

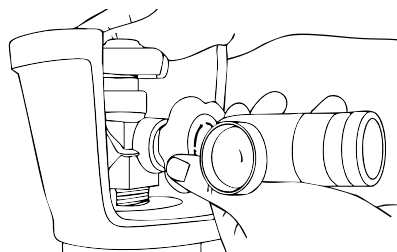

- 2** Stel de flowmeter (aantal liters per minuut) zoals is voorgeschreven door uw arts in op uw reduceerventiel door aan de rechterknop te draaien.

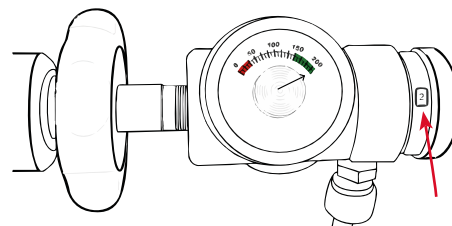

- 3** Open de cilinder door rustig de hoofdkraan van de cilinder open te draaien. De draaiknop bevindt zich boven op de cilinder.
Richt het reduceerventiel van je af tijdens het opendraaien.

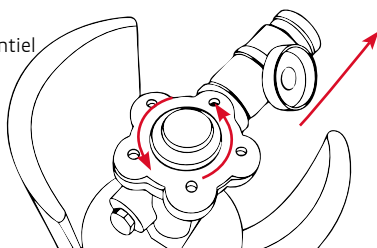


- 4** Als de wijzer in het groene vak op 200 bar staat, hoort u een sissend geluid. Sluit nu de neusbril, zuurstofmasker of lange slang aan op het reduceerventiel.




Verwijderen reduceerventiel


- 1** Sluit de cilinder door rustig de hoofdkraan van de cilinder dicht te draaien. De draaiknop bevindt zich boven op de cilinder.

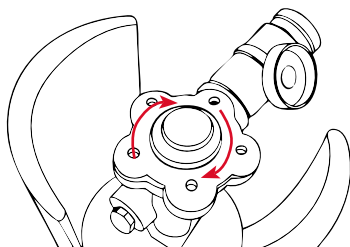

- 2** U hoort/laat nu de resterende zuurstof uit het reduceerventiel lopen.

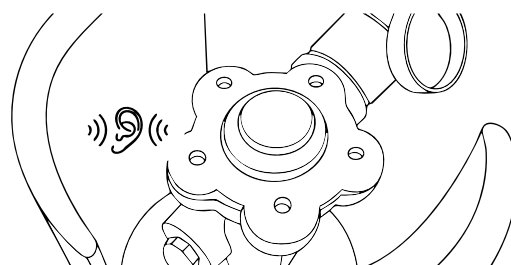

- 3** Controleer of alle zuurstof uit het reduceerventiel is door op de inhoudsmeter te kijken. Deze dient in het rode vlak op 0 te staan.

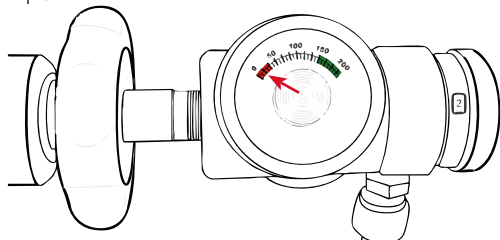

- 4** Schroef het reduceerventiel van de cilinder. Dit kan zonder kracht met 2 vingers gebeuren. **Let op!** Hierbij mag geen gebruik worden gemaakt van gereedschap.

