

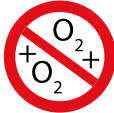


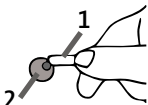

Instructiekaart Zuurstofconcentrator



westfalenmedical.com/kennisbank/

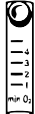

1 Lees altijd de instructies. 	2 Geen open vuur. Niet roken. Ook geen e-smoker/vape. En gebruik geen olie en/of vethoudende producten. 	3 Ventileer de ruimte goed. Kijk voor advies op de meegeleverde ventilatiewijzer. 
4 Gebruik i.v.m. brandveiligheid geen elektrische apparaten die vonken kunnen opwekken in de ruimte waar de concentrator staat en de client is. 	5 Plaats de concentrator op een veilige plek zoals de servicemedewerker heeft aangegeven. De concentrator moet altijd rechtop gebruikt worden. 	6 Plaats de concentrator niet onder de kapstok of tegen de gordijnen. Dit i.v.m. verzadiging zuurstof. 
7 Er mogen geen verlengkabels worden gebruikt. 	8 Technisch onderhoud mag alleen verricht worden door de servicemedewerker. 	9 Stop de stekker in het stopcontact en zet de concentrator aan d.m.v. de aan/uitknop. aan ● uit ○
10 Schuif de lange zuurstofslang (1) over de grijze tule (2). Controleer of de slang goed vast zit. 	11 Firesafe. Plaats de firesafe tussen de neusbril en de lange slang. 	12 Stel de flowmeter (aantal liters per minuut) in zoals voorgeschreven door uw arts. 
13 Ervaart u geen flow? Controleer de flow door de neusbril en/of slang te plaatsten in een glas water. Bij geen bubbels, slang nalopen en de flowmeter controleren. Bij nog geen flow contact opnemen met Westfalen Medical.	14 Na gebruik de concentrator uitzetten. Zet de concentrator uit als deze niet wordt gebruikt. aan ○ uit ●	15 Maximale lengte verbindingsslang. 
16 Wij adviseren u de neusbril 1x per week te vervangen. 	17 Het groffilter dient wekelijks te worden schoongemaakt. Bekijk de achterkant van deze kaart voor de schoonmaak-instructies. 	18 Storingen en/of vragen: Tel. 0570 - 858 450  Westfalen Medical



Instructiekaart Filters

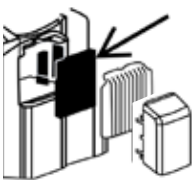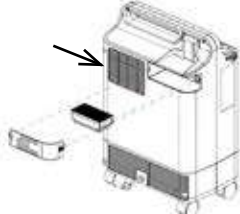1	Filter bevindt zich aan de achterkant.	2	Groffilter wekelijks stofzuigen.
Perfect 02			
1	Filters bevinden zich aan beide zijden.	2	Groffilters wekelijks stofzuigen aan beide zijden.
Perfect 02			
1	Filter bevindt zich aan de achterkant.	2	Groffilter wekelijks stofzuigen.
Kröber 02 / 4.0			
1	Filter bevindt zich aan de achterkant.	2	Groffilter wekelijks stofzuigen.
DeVilbiss 1025 / C525			
1	Filter bevindt zich aan de achterkant.	2	Aanzuiging wekelijks stofzuigen.
Everflo			
1	Filter bevindt zich aan de zijkant.	2	Groffilter wekelijks stofzuigen.
Philips Oxygenate 5			