



Het compacte volgelaatsmasker dat iedereen gemakkelijk past

Het AirFit F20-volgelaatsmasker biedt een innovatief InfinitySeal™ siliconenkussen: getest zodat het voldoet aan de hoogste therapeutische standaarden en ontworpen om patiënten een comfortabele pasvorm te bieden ongeacht hun gezichtsvorm of -grootte. Het is heel geschikt voor patiënten die op zoek zijn naar een minder claustrofobisch masker dat nog altijd een goed zicht biedt.

Universele pasvorm

In internationale studies paste de AirFit F20 bij 96,5% van alle patiënten.^{1, 2, 3, 4} Dit betekent dat u patiënten onmiddellijk kunt bieden wat ze nodig hebben en met vertrouwen naar huis kunt sturen.

Betrouwbare afdichting

Het masker heeft een kussen dat gemakkelijk de meest voorkomende situaties beheerst en getest is om een sterke luchtuitstroom te voorkomen, zich aan te passen aan de beweging van de patiënt en zelfs bij hoge druk een betrouwbare afdichting te bieden.

Comfortabel gebruik

Het flexibele met stof beklede frame biedt extra comfort terwijl het ook zorgt voor algemene stabiliteit en een vrijer zicht.



Dankzij het InfinitySeal-design past de AirFit F20 zich aan de unieke gelaatsvormen van elke patiënt aan, zodat u erop kunt vertrouwen dat het masker een veilige en comfortabele pasvorm biedt.



Vrij zicht

Patiënten kunnen meer zien en doen in bed dankzij een frame onder de ogen dat algehele stabiliteit combineert met minder gezichtscontact.

Zacht en aangenaam

De comfortabele hoofdband is speciaal ontworpen om extra zachtheid en stabiliteit te bieden. Dit helpt ervoor te zorgen dat patiënten snel aan de therapie wennen.

Snelle bevestiging

De AirFit F20 op- en afzetten duurt minder dan 1 minuut¹ en is comfortabel en intuïtief dankzij magnetische clips die de hoofdband in enkele seconden correct aan het frame bevestigen.

Betrouwbare afdichting

Patiënten genieten van een betrouwbare en effectieve afdichting dankzij het InfinitySeal-siliconenkussen – dit voorkomt een te sterke luchtuitstroom, corrigeert bij een slechte bevestiging en sluit goed af bij variabele druk.

Zacht en flexibel frame

Het zachte en flexibele frame past zich aan verschillende gelaatsvormen aan en biedt extra comfort dankzij de geïntegreerde vulling. Dit maakt het masker geschikt voor de meeste patiënten.

Flexibel verbinden en bewegen


De 'quick release' functie van het elleboogstuk maakt 's nachts verbinden of ontkoppelen eenvoudiger, terwijl de mogelijkheid om 360° te roteren meer bewegingsvrijheid biedt.




AirFit F20 for Her

Speciaal voor vrouwen ontworpen. Biedt een kleinere maatvoering die is afgestemd op de vrouwelijke gezichtscontouren.

In internationale studies paste de AirFit F20 bij 96,5% van alle patiënten.^{1, 2, 3, 4}

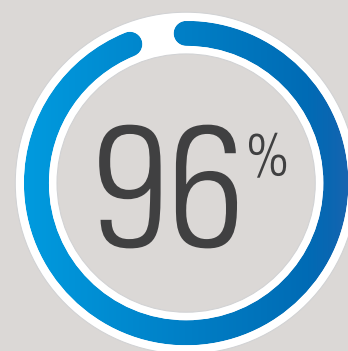

Door het minimaal aantal onderdelen is de AirFit F20 eenvoudig te gebruiken en te reinigen.

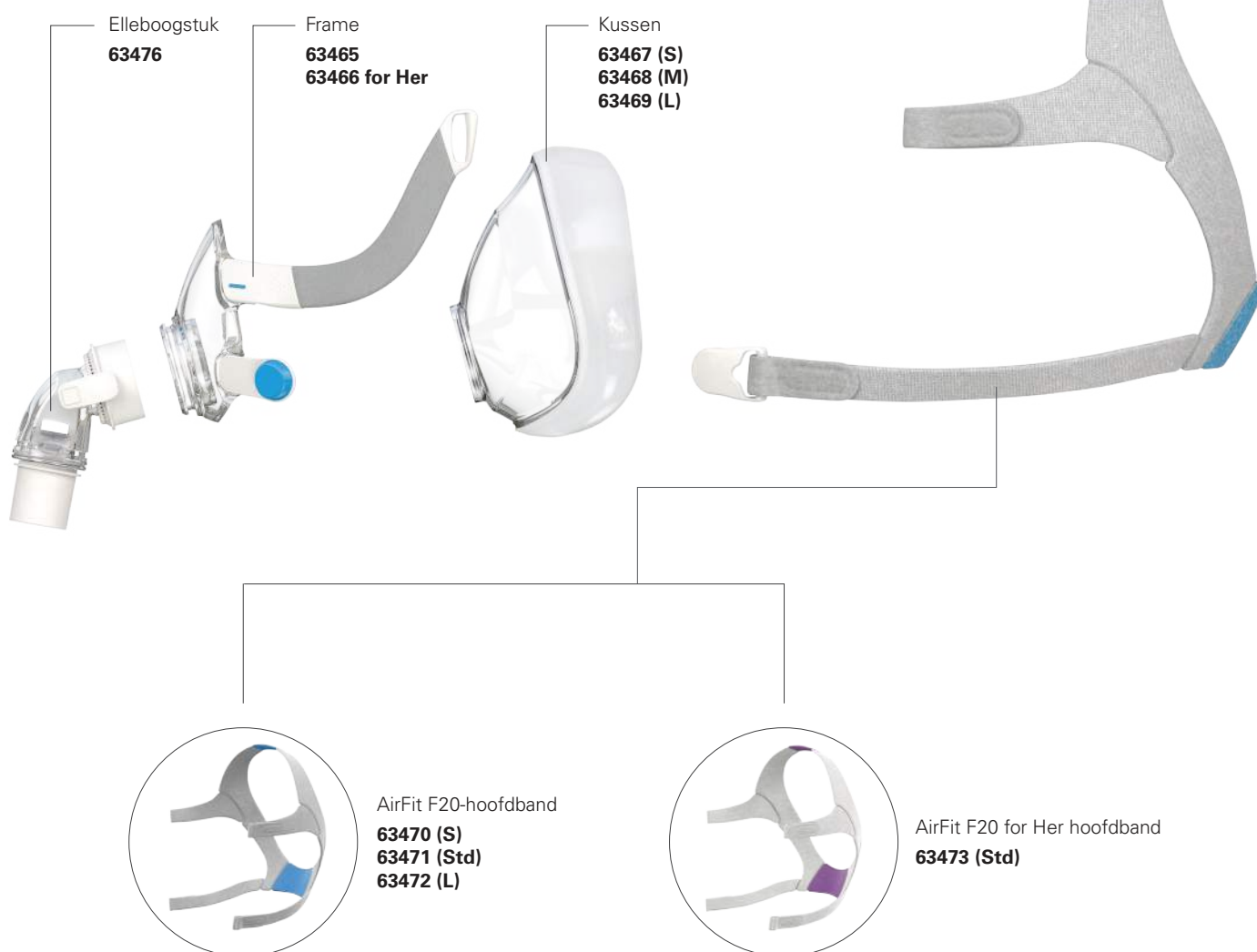


De juiste maat kiezen

De Airfit F20 heeft drie verwisselbare kussengroottes - small, medium en large. Het modulaire design van de AirFit F20 betekent dat elke kussengrootte eenvoudig in hetzelfde maskerframe klikt. Op die manier kunt u ze eenvoudig verwisselen voor meer flexibiliteit.

Wij raden u aan om het maatsjabloon te gebruiken om te meten welke maat het meest geschikt is voor elk van uw patiënten.

U kunt dit downloaden op ResMed.com/AirFitF20

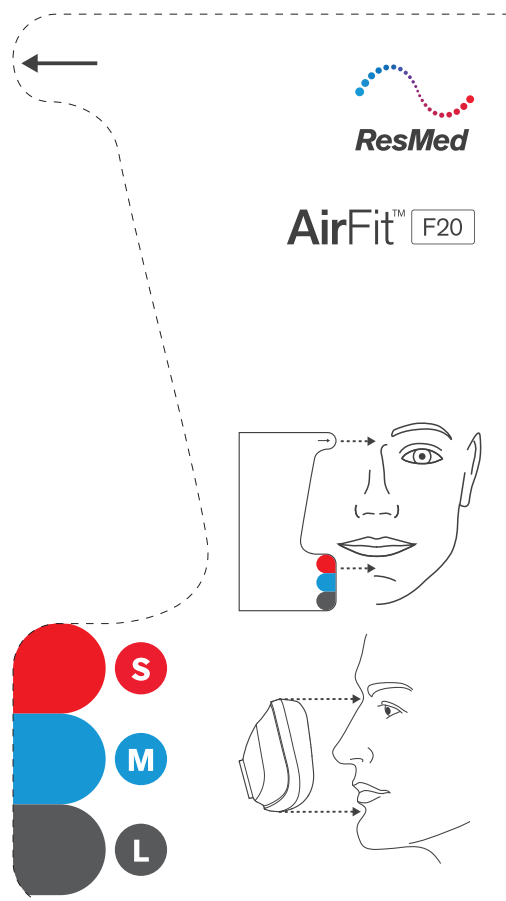


Productcodes



AirFit F20: Small	63405
AirFit F20: Medium	63406
AirFit F20: Large	63407
AirFit F20 for Her: Small	63408
AirFit F20 for Her: Medium	63409



86% van de patiënten verkoos de afdichting van de AirFit F20 boven die van het meest verkochte volgelaatsmasker.¹

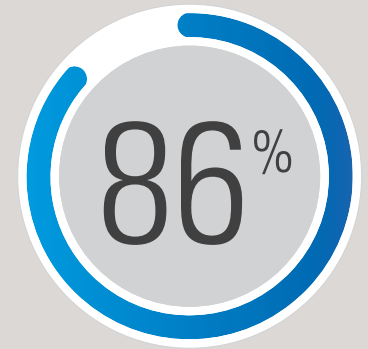

Speciaal ontwikkelde kussentechnologie: variabele dikte voor meer comfort en stabiliteit

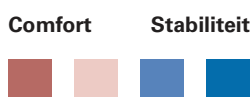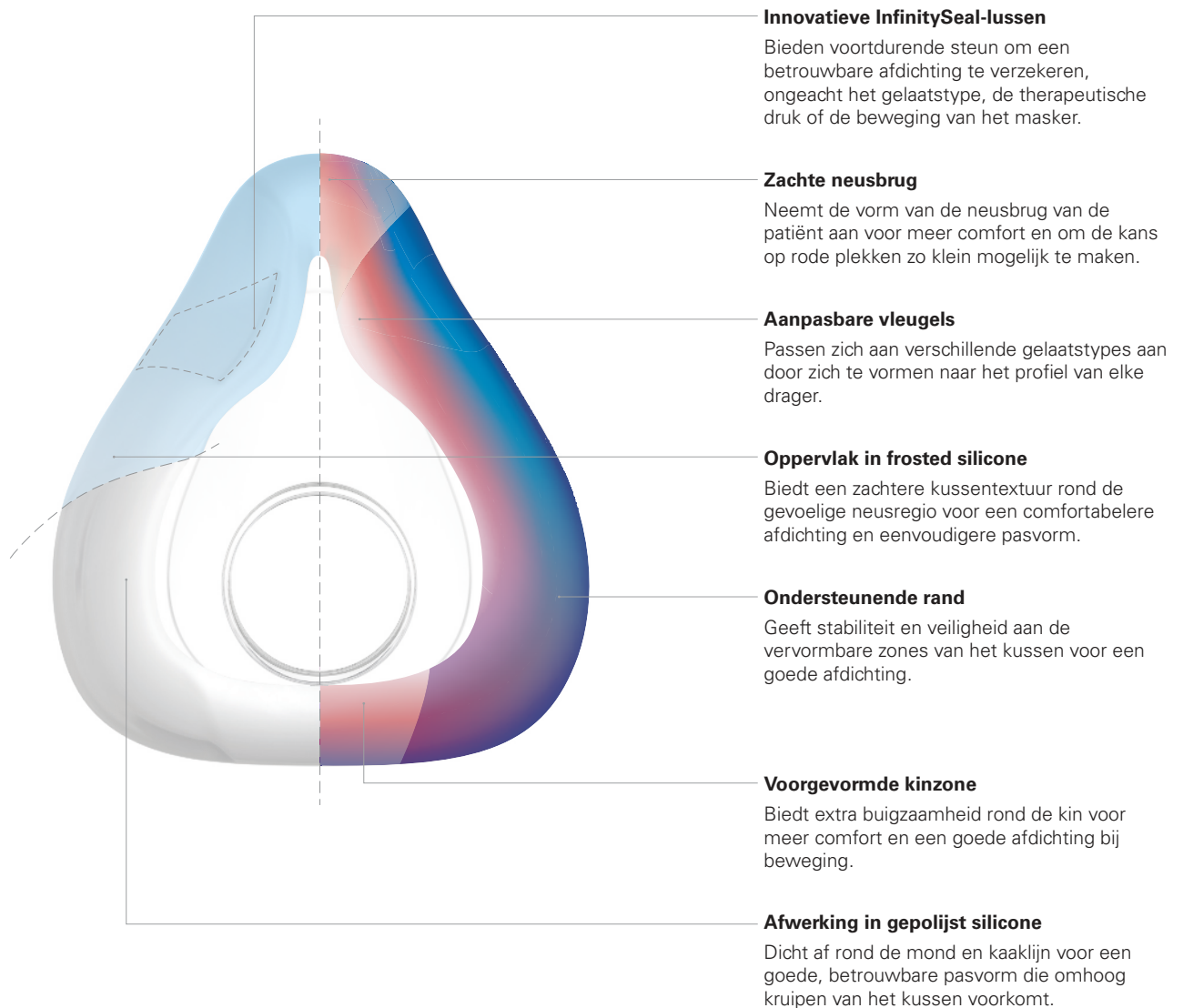

Pasinstructies voor de AirFit F20



- Wees er zeker van dat de magneten op de onderste banden losgeklikt zijn.
- Als ze zijn vastgeklikt, maakt u ze los door ze naar buiten te draaien en bij het frame vandaan te trekken.



- Houd het masker naar uw gezicht toe en zorg ervoor dat de bovenkant van het masker in lijn is met de bovenkant van de neusbrug.
- Trek de hoofdband over het hoofd. Zorg daarbij dat het ResMed-logo zich aan de buitenkant bevindt.



- Plaats de onderste banden allebei onder de oren.
- Beweeg beide magneten omhoog totdat ze tegen de bijbehorende clips op het frame zitten.



- Stel de bevestigingsclipjes op de bovenste banden af totdat het masker recht en stabiel zit.
- Zet de bevestigingsclipjes weer vast.



- Herhaal stap 4 met de onderste banden.



- Sluit de luchtslang aan op het elleboogstuk. Klik vervolgens het elleboogstuk in de voorzijde van het masker.
- Start het apparaat.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor verdere instructies.



Aanvullende opties

- Patiënten kunnen het onderste deel van de hoofdband op of onder hun haar plaatsen, voor afstemming op elk kapsel.

1 Interne ResMed-studie bij 22 bestaande ResMed-patiënten, uitgevoerd van 26/04/2016 - 27/05/2016, waarbij het toonaangevende masker op de markt werd vergeleken met de AirFit F20. Voorlopige patiëntenstudie - beschikbare gegevens; ID A3810791.

2 Interne ResMed AirFit F20-passtudie bij 27 ResMed en niet-ResMed-patiënten, uitgevoerd tussen 30/03/2016 - 04/04/2016. Voorlopige patiëntenstudie - beschikbare gegevens; ID A3751086.

3 Wereldwijde interne ResMed AirFit F20-passtudie bij 34 ResMed en niet-ResMed-patiënten, uitgevoerd tussen 11/04/2016 - 15/04/2016. Voorlopige patiëntenstudie - beschikbare gegevens; ID A3774922.

4 Wereldwijde interne ResMed AirFit F20-passtudie bij 90 ResMed en niet-ResMed-patiënten, uitgevoerd tussen 06/06/2016 - 22/06/2016. Voorlopige patiëntenstudie - beschikbare gegevens; ID A3830701.