



ResMed

AirSense™ 10 AUTOSET

ELITE



Home-knop om op elk moment naar het Home-scherm terug te keren

Start/stop-knop om met de therapie te beginnen

Draaiknop om door de opties te navigeren en de opties te wijzigen

Luchtuitlaat voor aansluiting van de luchtslang

Snelstartgids
Nederlands

Lees vóór gebruik de volledige gebruikershandleiding van uw AirSense™ 10.

Opstelling




Plaats het apparaat op een stabiel, horizontaal oppervlak.



Steek de stekker in de achterkant van het apparaat. Sluit het ene uiteinde van het elektriciteits snoer aan op de voedingseenheid en het andere uiteinde op het stopcontact.



Sluit de luchtslang stevig aan op de luchtuitlaat op de achterkant van het apparaat.

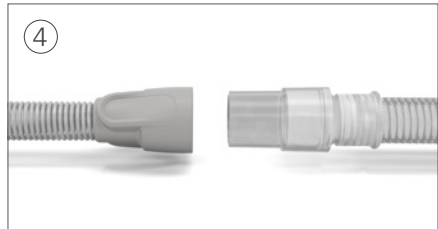

Sluit het vrije uiteinde van de luchtslang stevig aan op het in elkaar gezette masker. Druk op de start/stop-knop om met de therapie te beginnen.

AirSense 10 met HumidAir

Als u een AirSense 10 apparaat hebt met HumidAir™, vul de bevochtiger dan als volgt:



Open de bevochtiger en vul deze tot aan de markering voor maximaal waterpeil met water.



Sluit de bevochtiger en steek deze in de zijkant van het apparaat.

Verwarmde bevochtiging biedt verlichting bij droogheid en verstopping en is bestemd om de therapie comfortabeler te maken. Als u geen AirSense 10 apparaat met HumidAir hebt, kunt u overwegen om een HumidAir en ClimateLineAir™ verwarmde luchtslang aan te schaffen.

Therapie bijstellen


Als u dit product voor het eerst gebruikt, hebt u wellicht wat tijd nodig om u aan de therapie aan te passen. Dit is niet ongewoon. Voor de meeste patiënten duurt het ongeveer één à twee weken om zich aan de luchtdruk aan te passen.

Verbetering van klachten door aanpassing van de comfortinstellingen

Als u moeite hebt om u aan de therapie aan te passen, gebruik dan de comfortfuncties van de AirSense 10 om u te helpen beter te slapen.

- **Moeite om in slaap te vallen**—als u moeite hebt om in slaap te vallen met de hoge druk, zet dan automatische Aanlooptijd aan of verhoog de Aanlooptijd.
- **Opgeblazen gevoel**—als u een iets opgeblazen gevoel hebt door het inslikken van lucht, zet dan automatische aanloop aan of verhoog de Aanlooptijd.
- **Gevoel niet genoeg lucht te krijgen**—als u het gevoel hebt dat u niet genoeg lucht krijgt, zet de Aanlooptijd dan uit.

De Aanlooptijd wijzigen:

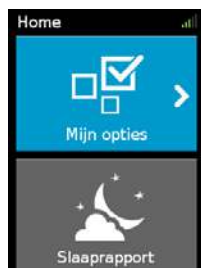

1. Druk op de draaiknop om Mijn opties te openen.



2. Draai de draaiknop om Aanlooptijd te markeren en druk nogmaals op de draaiknop om Aanlooptijd te selecteren.



3. Draai de draaiknop om naar wens bij te stellen.



4. Druk op de draaiknop om de wijziging op te slaan.

Als u een AirSense 10 apparaat met HumidAir hebt, hebt u nog andere comfortfuncties beschikbaar om uw therapie comfortabeler te maken.

- **Droge neus of loopneus**—Als u een droge neus of een loopneus krijgt, stel het Vochtigh. Niv. dan in op een hogere waarde.
- **Waterdruppels (condensatie)**—Als u waterdruppels op uw neus, masker of luchtslang krijgt, stel het Vochtigh. Niv. dan in op een lagere waarde.



ResMed

Reiniging

1. Was de luchtslang in warm water met een mild reinigingsmiddel.
Niet reinigen in een vaatwasser of wasmachine.
2. Spoel de luchtslang goed door en laat hem drogen uit de buurt van direct zonlicht en/of warmte.
3. Neem de buitenkant van het apparaat af met een droge doek.

Als u een AirSense 10 apparaat met HumidAir hebt, reinig de bevochtiger dan volgens stap 1 en 2.
Zie de gebruikershandleiding van het masker voor gedetailleerde aanwijzingen voor het reinigen ervan.

De onderdelen regelmatig controleren en vervangen

Voor uw comfort en gezondheid is het belangrijk dat u de onderdelen en benodigdheden regelmatig controleert en vervangt. De onderdelen en benodigdheden op regelmatige basis vervangen draagt bij tot uw optimale therapie en constante comfort.

Zie de gebruikershandleiding van de AirSense 10 voor gedetailleerde aanwijzingen voor het controleren van uw apparaat. Neem contact op met uw zorgverlener voor informatie over uw vervangingschema.

Serienummer	Apparaatnummer
Maskertype en -maat	Datum opstelling
NB:	



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australië

DEALERADRESSEN:

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 VS
EC/REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Verenigd Koninkrijk

Kijk op www.resmed.com voor andere ResMed vestigingen over de hele wereld. Zie www.resmed.com/ip voor informatie over octrooien. AirSense, ClimateLine en HumidAir zijn handelsmerken van ResMed Ltd. ClimateLine is geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office. © 2014 ResMed Ltd. 378330/1 2014-10

ResMed.com

CE
0123



378330