



Productspecificatie Helios Topfill 36 liter

| Helios Topfill 36 liter | |
|-------------------------|-----------------|
| Flowinstelling | Gebruikstijd |
| 0,50 | 43 dagen |
| 0,75 | 28 dagen |
| 1,0 | 20 dagen |
| 1,5 | 14 dagen |
| 2,0 | 10 dagen |
| 3,0 | 7 dagen |
| 4,0 | 5 dagen |
| 5,0 | 4 dagen |
| 6,0 | 3 dagen |
| 8,0 | 2 dagen |
| 10,0 | 1 dag en 12 uur |
| Hoogte | 85,1 cm |
| Diameter | 39,1 cm |
| Gewicht leeg | 24 kg |
| Gewicht vol | 62,6 kg |

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.