

Antibiotica verneveltherapie

Westfalen
Medical

Westfalen Medical

De totaalleverancier voor respiratoire therapieën

Waar het gaat om verneveltherapie en daaraan gerelateerde apparatuur en medicatie komt Westfalen Medical in beeld. Dagelijks voorzien wij onze afnemers in hun totale behoefte daaraan. Enerzijds is dit een groeiende groep patiënten thuis, anderzijds leveren wij aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen, hulpdiensten en cliënten die verblijven in verzorgingshuizen. Ons assortiment omvat eveneens producten zoals CPAP-, PEP-, Nasal High Flow- en zuurstofapparatuur. Ook zijn wij van origine leverancier van medische en medicinale gassen. Met een landelijk dekkend netwerk zijn we in staat adequaat en snel te leveren. Als het moet zelfs binnen 4 uur. Dat is een verademing.



Onze missie

Westfalen Medical is gericht op het bieden van verfijnde oplossingen aan de uiterst kritische zorgverleners binnen het speelveld van de gezondheidszorg. Hoogwaardige producten en uitstekende service zijn de pijlers waarop Westfalen Medical voortborduurt. Innovatief en professioneel. Nu en in de toekomst.

Onze visie

Ten grondslag aan onze missie ligt onze visie. Wij vatten die samen in 3 kernbegrippen:



1. Wakker zijn

We zijn voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied. Daar staan we niet alleen voor open, we denken ook vooruit en luisteren naar onze klanten. Zij zijn het referentiekader dat ons scherp houdt en ons uitdaagt om op een innovatieve manier vorm te geven aan het welzijn van onze klanten en de toekomst van ons bedrijf.

2. Vitaliteit

We doen ons werk met plezier en enthousiasme in een omgeving met ruimte voor nieuwe initiatieven. De impuls die daarvan uitgaat zorgt voor energie en teamspirit. Nemen we een beslissing, dan doen we dat weloverwogen en staan we achter de uitwerking. De obstakels die we onderweg tegenkomen, zien we als uitdagingen om te overwinnen. Met doorzettingsvermogen willen we eigen en gemeenschappelijke doelstellingen realiseren.

3. Betrokkenheid

We streven naar een duurzame relatie met onze klanten. Een band die is opgebouwd uit waardering en vertrouwen. In die relatie is luisteren belangrijk. Om te begrijpen wat mensen bezighoudt en wat ze belangrijk vinden. Om samen te bepalen welke hulp waar en op welke manier het best tot zijn recht komt. Met een goed gevolg voor beide partijen.

Inhoud

- 2 Westfalen Medical
- 4 Inhoud
- 6 Waarom kiezen voor Westfalen Medical?
- 8 Overzicht compressoren, besturingseenheden en vernevelaars

Antibiotica via ApotheekZorg

- 9 Tobramycine (Vantobra)
- 10 Tobramycine (TOBI, Bramitop, Steri-Neb of Tobramycine)
- 11 Colistine (Tadim)
- 12 Colistine (Colistin[®])
- 13 Aztreonam (Cayston)
- 14 Levofloxacin (Quinsair)
- 15 Pentamidine (Cayston)

Overige medicatie via ApotheekZorg

- 16 Dornase Alfa (Pulmozyme)
- 17 Hypertonisch zout (Mucoclear 6%, Nebusal 7%, of Hyaneb 7%)
- 18 Samenvatting
- 21 Westfalen Medical en ApotheekZorg
- 22 Compliance bij verneveltherapie
- 24 Aanvragen verneveltherapie
- 25 Ons aanvraagportaal
- 26 Heeft u nog vragen?



Waarom kiezen voor Westfalen Medical?

Bij aanhoudende luchtweginfecties, waarbij orale of intraveneuze antibiotica niet het gewenste resultaat bieden, vormt verneveltherapie een krachtig alternatief. Door antibiotica direct in de longen toe te dienen, wordt een hoge lokale concentratie bereikt op de plek van de infectie, met minimale systemische bijwerkingen. Westfalen Medical ondersteunt u en uw patiënt gedurende het gehele traject – van aanvraag tot nazorg.



Compleet en efficiënt geregeld

Bij Westfalen Medical vraagt u in één keer zowel de medicatie als de vernevelaar aan. Op basis van de voorgeschreven antibiotica selecteren wij de meest geschikte vernevelaar, zodat uw patiënt snel en veilig kan starten met de therapie. Dankzij ons landelijke netwerk en het gebruiksvriendelijke online portaal verloopt het aanvraagproces snel en efficiënt.

Let op: Zorg er altijd voor dat er luchtwegverwijdende vernevelmedicatie wordt aangevraagd bij proefverneveling thuis.

- ✓ Volledige thuisondersteuning
- ✓ Optimale therapietrouw en tijdswinst
- ✓ Persoonlijke service en deskundige ondersteuning



Volledige thuisondersteuning

Bij volledige thuisondersteuning leveren wij de medicatie (standaard luchtwegmedicatie en antibiotica), vernevelapparatuur, uitleg en indien gewenst proefvernevelen rechtstreeks bij de patiënt thuis. Eén van onze gespecialiseerde, BIG-geregistreerde verpleegkundigen verzorgt een heldere en persoonlijke instructie over het gebruik van de vernevelaar, medicatie en hygiëne. Zo kunnen patiënt en mantelzorgers vol vertrouwen aan de behandeling beginnen. Tevens is het een mogelijkheid om bij de aanvraag proefvernevelen aan te vragen. Onze verpleegkundige gaat dan samen met uw patiënt eerst thuis proefvernevelen volgens een strikt protocol. Ook met gepaste veiligheidsmaatregelen voor bronchospasmen. Dit protocol kunt u opvragen bij uw accountmanager.

Optimale therapietrouw en tijdswinst

Door de combinatie van de juiste vernevelaar en medicatie wordt het behandelproces versneld en de therapietrouw (compliance) vergroot. Zo duurt het vernevelen van Vantobra met een Tolero vernevelaar slechts 4 minuten – een tijdswinst van maar liefst 11 minuten ten opzichte van traditionele vernevelaars¹. Dit bevordert de therapietrouw en voorkomt onnodige ziekenhuisopnames, extra consulten en bijkomende zorgkosten².

Persoonlijke service en deskundige ondersteuning

U krijgt een vaste accountmanager en directe toegang tot ons gespecialiseerde vernevelteam voor al uw vragen. Wij denken mee en bieden ondersteuning op maat, zodat u zich volledig kunt richten op de zorg voor uw patiënt.

¹SmPC Vantobra

² © 2011 European Cystic Fibrosis Society. Published by Elsevier B.V.

Overzicht compressoren, besturingseenheden en vernevelaars

PARI BOY Classic (vernevel compressor)



eBase Controller (besturingseenheid)



Vernevelaars + filters

LC Plus



LC Sprint



Filterhuis



Vernevelaars + filters

Tolero



Altera




Filterhuis



LC Sprint Star



Filterpads

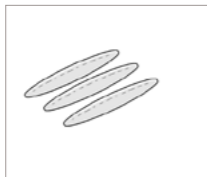


Zirela



eFlow Rapid



Filterpads

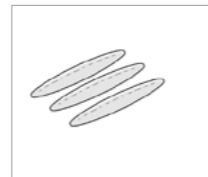

Antibiotica via ApotheekZorg

Tobramycine

Vantobra	
Samenstelling	170 mg per ampul
Vernevelfrequentie	2 x daags 1 ampul
Besturingseenheid	eBase Controller
Vernevelaar + filters	Tolero (bij medicatie), filterhuis en filterpads
Druppelgrootte	3,8 μm^1
Respireerbare dosis < 5 μm	72%
Verneveltijd	3,9 min ¹

eBase Controller




Tolero



Filterhuis



Filterpads

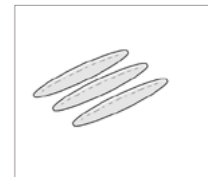

Tobramycine

TOBI, Bramitop, Steri-Neb of Tobramycine				
Samenstelling	Verschillend per verneveloplossing			
Vernevelfrequentie	Verschillend per verneveloplossing			
Besturingseenheid	PARI BOY Classic			
Vernevelaar + filters	LC Plus, filterhuis en filterpads			
	TOBI	Bramitob	Steri-Neb	Tobramycine
Druppelgrootte	3,6 μm^2	3,15 μm^3	Onbekend	3,3 μm^5
Respireerbare dosis < 5 μm	65%	65-67%	Onbekend	66,7%
Verneveltijd	15,3 min ²	15 min ³	15 min ⁴	15 min ⁵

PARI BOY Classic




LC Plus



Filterhuis



Filterpads

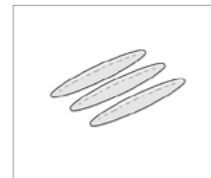

Colistine

Tadim	
Samenstelling	1 MIE (80 mg per flacon)
Vernevelfrequentie	2x daags 1 MIE, 2x daags 2 MIE
Besturingseenheid	eBase Controller
Vernevelaar + filters	eFlow Rapid, filterhuis en filterpads
Druppelgrootte	4,56 μm eFlow Rapid ⁶
Respireerbare dosis < 5 μm	58,19%
Verneveltijd	5 min, eFlow Rapid ⁶

eBase Controller




eFlow Rapid



Filterhuis



Filterpads

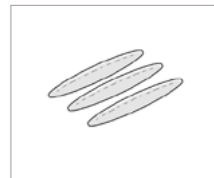

² SmPC Tobi

³ SmPC Bramitob

⁴ SmPC Steri-Neb

⁵ SmPC Tobramycine (Aristo)

⁶ SmPC Tadim

Colistine

Colistin ⁷	
Samenstelling	1 MIE
Vernevelrequentie	2 - 3x daags 1 MIE - 2 MIE. Max. 6 MIE per dag
Besturingseenheid	eBase Controller of PARI BOY Classic
Vernevelaar + filters	eFlow Rapid, LC Plus of LC Sprint Star, filterhuis en filterpads
Druppelgrootte	Onbekend
Respireerbare dosis < 5 µm	Onbekend
Verneveltijd	Onbekend

eBase Controller



Filterhuis



PARI BOY Classic




Filterhuis



eFlow Rapid



Filterpads

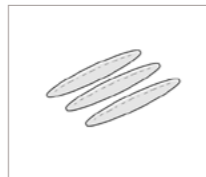


LC Plus



LC Sprint Star



Filterpads

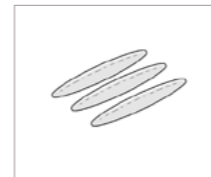

⁷SmPC Colistin

Aztreonam

Cayston	
Samenstelling	75 mg poeder per flacon
Vernevelrequentie	3x daags 1 flacon
Besturingseenheid	eBase Controller
Vernevelaar + filters	Altera, filterhuis en filterpads
Druppelgrootte	3,6 µm ⁸
Respireerbare dosis < 5 µm	Onbekend
Verneveltijd	3 min ⁸

eBase Controller




Tolero



Filterhuis



Filterpads

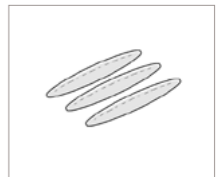

⁸SmPC Cayston

Levofloxacin

Quinsair	
Samenstelling	240 mg poeder per ampul
Vernevelrequentie	2x daags 1 flacon
Besturingseenheid	eBase Controller
Vernevelaar + filters	Zirela, filterhuis en filterpads
Druppelgrootte	3,56 μm^9
Respireerbare dosis < 5 μm	Onbekend
Verneveltijd	9,65 min ⁹

eBase Controller




Zirela



Filterhuis



Filterpads

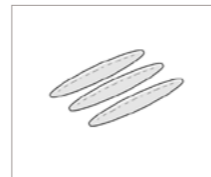

Pentamidine

Cayston	
Samenstelling	Pentamidine (vernevelvorm)
Vernevelrequentie	1x per maand 300 mg of elke 2 weken 150 mg (dosering bij kinderen is niet vastgesteld)
Besturingseenheid	PARI BOY Classic
Vernevelaar + filters	LC Sprint Star, filterhuis en filterpads
Druppelgrootte	2,2 μm^{10}
Respireerbare dosis < 5 μm	98%
Verneveltijd	15-30 min ¹⁰

PARI BOY Classic




LC Sprint Star



Filterhuis



Filterpads

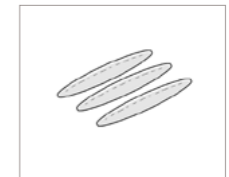

⁹SmPC Quinsair

¹⁰SmPC Pentamidine



Westfalen Medical en ApotheekZorg samen voor betere patiëntenzorg

Al jarenlang werkt Westfalen Medical nauw samen met ApotheekZorg. Dankzij deze samenwerking kunnen we gezamenlijk luchtwegmedicatie en de bijbehorende vernevelapparatuur aanbieden. Eerder werden deze producten apart geleverd en moesten ze bij verschillende aanbieders worden opgehaald.

Belang van de samenwerking

Door de handen ineen te slaan, zien zowel Westfalen Medical als ApotheekZorg hun markt toenemen. Echter, wie er het meest van profiteren zijn de patiënten met respiratoire aandoeningen, zoals cystic fibrosis en bronchiëctasieën. Zij krijgen alle benodigde genees- en hulpmiddelen met instructies bij hen thuis afgeleverd.

Ook u als zorgprofessional profiteert van extra gemak. Voor beide producten hoeft u maar één recept uit te schrijven en heeft u één contactpersoon. Bovendien wordt met de samenwerking voorzien in een belangrijke behoefte van met name de Nederlandse CF-centra, die hun vernevelaars en bijbehorende medicatie – zoals antibiotica en slijmoplossers – het liefst bij één partij afnemen.

Uniek partnerschap

Westfalen Medical is niet de eerste die vernevelapparatuur inclusief luchtwegmedicatie kan leveren, maar wel de eerste die daarvoor de samenwerking zoekt met een autonoom functionerende organisatie als ApotheekZorg. Dat maakt de samenwerking uniek.

Voordelen

- › Expertise rondom antibioticamedicatie
- › Mogelijkheid voor aanvragen standaard luchtwegmedicatie i.c.m antibiotica
- › Maar 1 recept nodig
- › Thuis proefverneveling mogelijk

Overige medicatie via ApotheekZorg

Dornase Alfa

Pulmozyme		
Samenstelling	2,5 mg per ampul	
Vernevelfrequentie	1 of 2x daags 1 ampul	
Besturingseenheid/vernevel compressor	eBase Controller, PARI BOY Classic	
Vernevelaar + filters	eFlow Rapid, LC Sprint of LC Plus	
	eFlow Rapid ¹¹	LC Plus ¹¹
Druppelgrootte	4,8 µm eFlow Rapid ¹¹	4,6 µm LC Plus ¹¹
Respireerbare dosis < 5 µm	Onbekend	Onbekend
Verneveltijd	2,7 min	10,2 min ¹²

eBase Controller



PARI BOY Classic



eFlow Rapid



LC Plus



LC Sprint



Hypertoon zout

Mucoclear 6%, Nebusal 7%, of Hyaneb 7%			
Samenstelling	NaCl 6%, 4 ml per ampul		
Vernevelfrequentie	1 of 2x daags 1 ampul		
Besturingseenheid/vernevel compressor	eBase Controller, PARI BOY Classic		
	Mucoclear 6%	Nebusal 7%	Hyaneb 7%
Druppelgrootte	4,2 µm	Onbekend	Onbekend
Respireerbare dosis < 5 µm	64,3%	Onbekend	Onbekend
Verneveltijd	Onbekend	Onbekend	Onbekend

eBase Controller



PARI BOY Classic



eFlow Rapid



LC Plus



LC Sprint



¹¹SmPC Pulmozyme

¹²Journal of Cystic Fibrosis

* Alleen Mucoclear mag in een eFlow Rapid verneveld worden

Samenvatting

Vernevelapparaat inclusief medicatie

Door de samenwerking met ApotheekZorg is het bij Westfalen Medical mogelijk om in één aanvraag de medicatie en vernevelaar aan te vragen. De mogelijke combinaties zijn in het overzicht weergegeven.

U kunt als voorschrijver aangeven dat Westfalen Medical op basis van het soort antibiotica de meest geschikte vernevelaar levert.



Werkzame stof	Tobramycine		Colistine	Aztreonam	Levofloxacine	Dornase alfa	Pentamidine	Hypertoon zout
Samenstelling	170 mg per ampul	300 mg per ampul	1 MIE (80 mg per flacon voor Tadim)	75 mg poeder per flacon	240 mg per ampul	2500 E/2,5 ml (2,5 mg per ampul)	Pentamidine (vernevelvorm)	Nacl 6% (4 ml per ampul)
Merknaam	Vantobra	Bramitob TOBI Steri-Neb Tobramycine	Tadim Colistin	Cayston	Quinsair	Pulmozyme	Pentacarinat	Mucoclear 6% (Nebusal 7%) (Hyaneb 7%)
Vernevel-frequentie	2x daags 1 ampul	2x daags 1 ampul	2 - 3x daags 1 MI - 2 MIE	3x daags 1 flacon	2x daags 1 ampul	1 - 2x daags	1x per maand 300 mg	1 - 2x daags
Besturings-eenheid/vernevel compressor	eBase Controller	PARI BOY Classic	eBase Controller PARI BOY Classic	eBase Controller	eBase Controller	eBase Controller PARI BOY Classic	PARI BOY Classic	eBase Controller PARI BOY Classic
Vernevelaar (SmPc)	Tolero (bij medicatie)	LC Plus	eFlow rapid LC Plus	Altera (bij medicatie)	Zirela (bij medicatie)	eFlow Rapid LC Sprint of LC Plus	LC Sprint Star	eFlow Rapid LC Sprint of LC Plus
Op verzoek	N.v.t.	eFlow Rapid	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.


Compliance bij verneveltherapie

Bij Westfalen Medical indiceert u in uw aanvraag voor verneveltherapie direct het recept voor de luchtwegmedicatie. In de meeste gevallen zorgen wij ervoor dat de medicatie rechtstreeks bij de patiënt thuis worden afgeleverd.

Door de vernevelaar en de medicatie via één loket aan te vragen, stuurt u maximaal op compliance. Zo duurt het vernevelen met Vantobra in combinatie met een Tolero vernevelaar slechts 4 minuten. Een tijdwinst van maar liefst 11 minuten in vergelijking met een Pari LC Plus vernevelaar¹.

Met dit voorbeeld laten wij u zien dat wij op basis van het geneesmiddel kiezen voor de kortste verneveltijd om zodoende de compliance te bevorderen². Onnodige ziekenhuisopnames en consulten en de daarmee gepaard gaande kosten worden hiermee voorkomen.

Bij ons zijn uw patiënten in goede handen. Wij zorgen voor een uitstekende nazorg door periodieke controles bij uw patiënt.

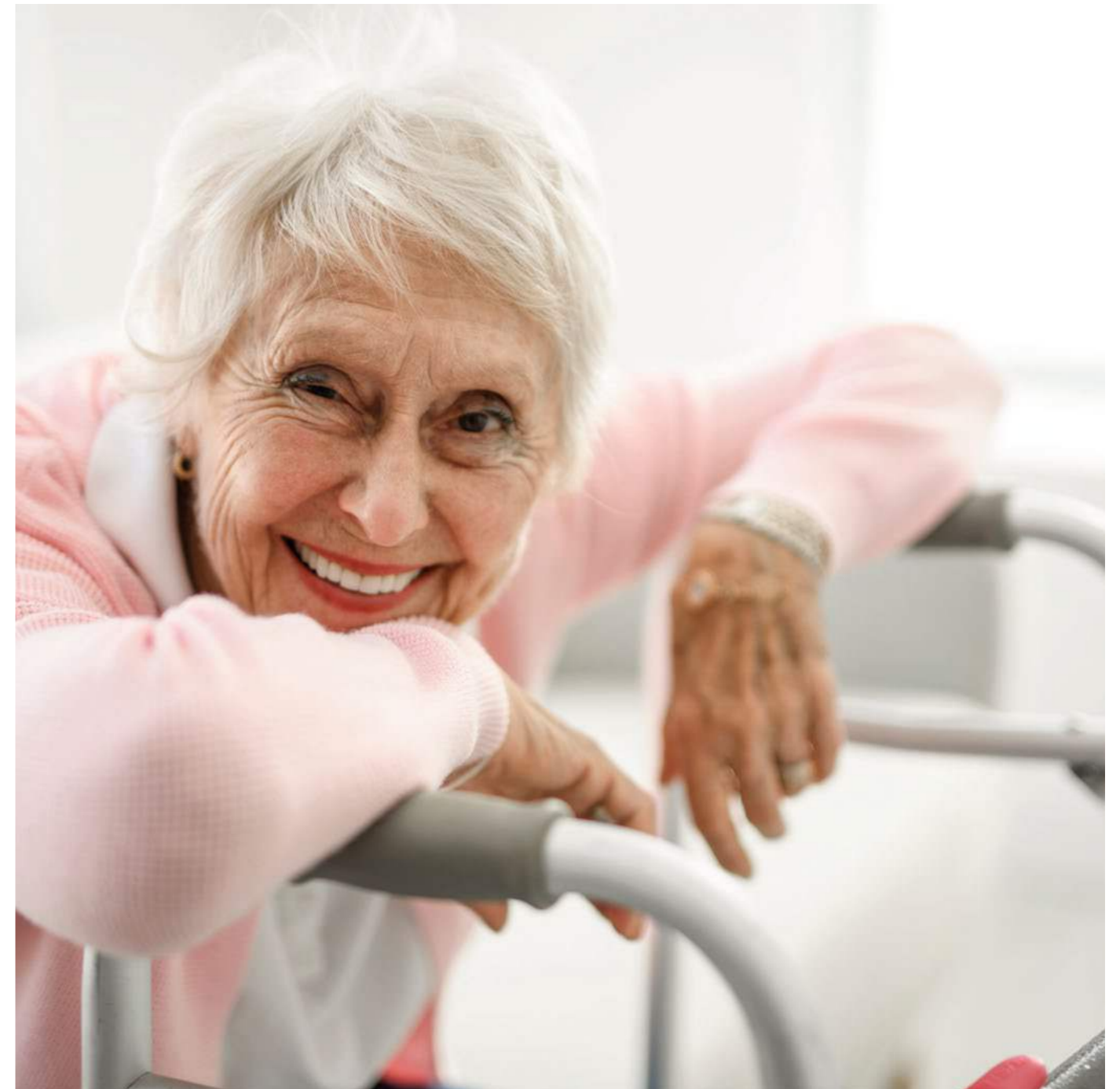

¹SmPC Vantobra

Society. Published by Elsevier B.V.

²©2011 European Cystic Fibrosis

Aanvragen verneveltherapie

Verneveltherapie kunt u bij ons makkelijk én in een veilige online omgeving aanvragen. Doordat uw aanvraag direct en compleet op de juiste plek terecht komt, kunnen we bovendien snel reageren.

De **6 voordelen** van digitaal aanvragen:

1. Tijdwinst

Het indienen van een digitale aanvraag is makkelijk en gaat snel. Het aanvraagportaal is bovendien 24 uur per dag bereikbaar. Ook het wijzigen van een aanvraag of het beëindigen van een therapie is eenvoudig.

2. Veilig

De patiëntgegevens worden door ons opgeslagen in een professioneel beveiligde omgeving die voldoet aan hoogwaardige kwaliteitseisen. Onbevoegden hebben geen toegang.

3. Volledig

Het invul scherm leidt u door alle vragen. Zo vergeet u geen antwoorden in te vullen en is uw aanvraag altijd compleet. Dit voorkomt fouten en zorgt ervoor dat de aanvraag sneller verloopt. Bijkomend voordeel is dat, zodra u het BSN en de geboortedatum van de patiënt ingevuld heeft, de volledige naam van de patiënt en de verzekeraar direct worden weergegeven.

4. Snellere verwerking van de aanvraag

Wij kunnen uw aanvraag vlot afhandelen en uw patiënt snel van dienst zijn. U ontvangt van ons een melding als uw aanvraag is ontvangen. Zodra de aanvraag is goedgekeurd door onze apotheker, ontvangt u hiervan eveneens een melding.

5. Delen van informatie

U kunt eenvoudig alle gegevens van de aanvraag delen met uw collega's door een beveiligde zorggroep in te richten. Hierdoor kunnen de geselecteerde collega's snel uw patiënten inzien en/of aanvragen wijzigen of stopzetten bij bijvoorbeeld uw afwezigheid. Uw accountmanager kan u helpen bij het inrichten van een zorggroep.

6. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Het aanvraagportaal staat op een HTTPS omgeving en is daardoor goed beveiligd. Gegevens die via HTTPS worden verzonden, worden beveiligd via het Transport Layer Security-protocol (TLS). Het is alleen de voorschrijver(s) die inzicht heeft in de patiëntgegevens.

Ons aanvraagportaal

De snelste en veiligste manier van aanvragen.

Met een eigen persoonlijk account kunt u op ieder gewenst moment een aanvraag indienen, een therapie wijzigen of een therapie stopzetten. U kunt eenvoudig alle gegevens van de aanvraag delen met uw collega's door een beveiligde zorggroep in te richten. Hierdoor kunnen de door u aangewezen collega's snel uw patiënten inzien en/of de therapie wijzigen of stopzetten. Uw accountmanager kan u helpen bij het inrichten van een zorggroep.



Wilt u eerst graag zien hoe ons aanvraagportaal er uitziet? Maak dan een afspraak met één van onze accountmanagers voor een demonstratie. Zij laten het u graag zien.

Heeft u nog vragen?

Wij bieden u diverse mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Op onze website geven wij bijvoorbeeld antwoord op veelgestelde vragen. Vindt u niet wat u zoekt neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn er voor u.

Contactgegevens

Tel. 0570 - 234 626

Fax 0570 - 858 451

vernevelaarinfo@westfalen.com

westfalenmedical.com

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08.00 uur tot 18.00 uur


Bereikbaarheid

buiten openingstijden

Tel. 0570 - 234 626

(uitsluitend voor spoedgevallen)



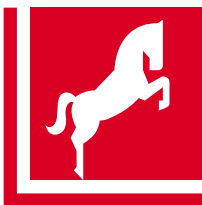

Westfalen Medical BV

Rigastraat 14

7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 234 626

Fax 0570 - 858 451

vernevelaarinfo@westfalen.com

westfalenmedical.com

Westfalen
Medical