
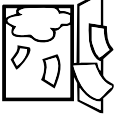
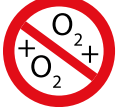
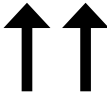
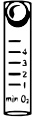
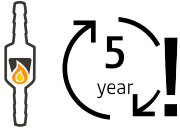


بطاقة تعليمات



جهاز تركيز الأكسجين

3	تهوية الغرفة جيدًا. للحصول على نصائح، راجع دليل التهوية المرفق. 	2	عدم وجود نار مشتعلة - عدم التدخين عدم إستعمال السجائر الإلكترونية. لا تستخدم المنتجات التي تحتوي على الزيت أو الشحوم. 	1	اقرأ التعليمات دائمًا. 
6	لا تضع جهاز التركيز تحت شماعة الملابس أو أمام الستائر، فهذا سيزيد من تشبع الأكسجين. 	5	ضع جهاز التركيز في مكان آمن، وفقًا لتوجيهات ممثل الخدمة. يجب استخدامه دائمًا في وضع مستقيم. 	4	لأسباب تتعلق بالسلامة من الحرائق، لا تستخدم معدات كهربائية يمكن أن تولد شرارات في الغرفة التي يوجد بها جهاز التركيز ويتواجد بها العميل. 
9	قم بتوصيل جهاز التركيز بمقبس الحائط وقم بتشغيله باستخدام زر التشغيل/الإيقاف. 	8	لا يجوز إجراء الصيانة الفنية إلا بواسطة فني الخدمة. 	7	لا يجوز استخدام أسلاك التمديد. 
12	اضبط مقياس التدفق (عدد اللترات في الدقيقة) حسب ما يصفه لك طبيبك. 	11	جهاز الآمان ضد الحريق: يُوضع جهاز آلمان ضد الحريق بين القنية الأنفية والأنبوب الطويل. 	10	مرر خرطوم الأكسجين الطويل (١) فوق الحلقة الرمادية (2). تأكد من تثبيت الخرطوم بإحكام. 
15	الحد الأقصى لطول خرطوم التوصيل. 	14	أطفئ جهاز التركيز بعد الاستخدام. أطفئه عند عدم استخدامه. 	13	لا يوجد تدفق؟ تحقق من التدفق بوضع القنية الأنفية و/أو الأنبوب في كوب من الماء. إذا لم تكن هناك فقاعات، فتتحقق من الأنبوب ومقياس التدفق. إذا استمر انقطاع التدفق، فتواصل مع مركز ويستفال الطبي.
18	الأعطال و/أو الأسئلة: Tel. 0570 - 858 450  Westfalen Medical	17	يجب تنظيف الفلتر الخشن أسبوعيًا. راجع تعليمات التنظيف على ظهر هذه البطاقة. 	16	ننصح باستبدال القنية الأنفية مرة واحدة في الأسبوع. 

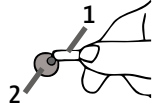

بطاقة التعليمات

المرشحات

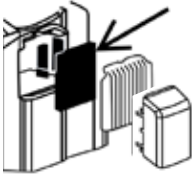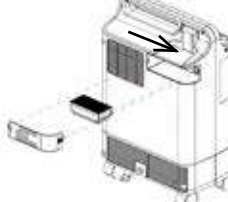2	تتواجد المرشحات في الجزء الخلفي.	1	قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة الكهربائية أسبوعيًا.
Perfect 02			
2	تتواجد المرشحات على كلا الجانبين.	1	قم بتنظيف المرشحات الخشنة بالمكنسة الكهربائية على كلا الجانبين أسبوعيًا.
Perfect 02			
2	تتواجد المرشحات في الجزء الخلفي.	1	قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة الكهربائية أسبوعيًا.
Kröber 02 / 4.0			
2	تتواجد المرشحات في الجزء الخلفي.	1	قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة الكهربائية أسبوعيًا.
DeVilbiss 1025 / C525			
2	تتواجد المرشحات في الجزء الخلفي.	1	قم بتنظيف مدخل الهواء بالمكنسة الكهربائية أسبوعيًا.
Everflo			
2	تتواجد المرشحات في جانب.		قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة الكهربائية أسبوعيًا.
Philips Oxygenate 5			