


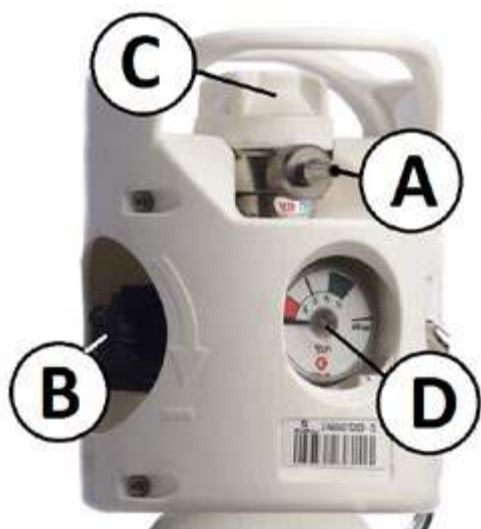

Instructiekaart mobiele zuurstofcilinder met combi afsluiter

Procedure

1. Haal zuurstofcilinder uit de tas.
2. Kies het zuurstofmasker.
3. Sluit de zuurstofslang aan op het masker en op de slangaansluiting van de zuurstofcilinder **(A)**.
4. Draai de afsluiter **(B)** langzaam open, deze bevindt zich aan de zijkant van de zuurstoffles.
5. Stel het reduceerapparaat in op de gewenste waarde met het keuzewiel aan de bovenzijde van de zuurstofcilinder **(C)**.
6. Vul de beademingszak met zuurstof. Dit is tevens een controle of er zuurstofflow aanwezig is.
7. Plaats het masker.



Indien er geen flow is

1. Draai de afsluiter langzaam open.
2. Controleer of de wijzer op de manometer (D) in het rood gemarkeerde gebied staat. Zo ja, dan is de cilinder leeg.
3. Zo nee:
 - a. controleer of de slangen juist zijn aangesloten;
 - b. controleer of er geen knik in de slang zit.
4. De manometer **(D)** geeft de cilinderdruk aan, echter er zijn twee uitvoeringen!
Type 1: Passieve manometer: geeft cilinderdruk alleen aan als de cilinderafsluiter (B) open is gedraaid!
Type 2: Actieve manometer: geeft cilinderdruk ook aan als cilinderafsluiter (B) dicht is, alleen bij 300 bar versie!

Veiligheid

Waar wordt gewerkt met medicinale gasen is het essentieel dat de gevaren en risico's bekend zijn van de stoffen die toegepast worden. Hiervoor zijn veiligheidsinformatiebladen (VIB) ontwikkeld die de benodigde informatie bevatten. De VIB zijn te downloaden op onze website. Daarnaast wijzen wij u op de patiëntbijsluiter. Deze wordt bij iedere levering van de zuurstof meegeleverd. Raadpleeg te allen tijde voor gebruik deze documenten.

Deze gebruiksinstructie vervangt nimmer de handleiding van de fabrikant(en).

