



De totaalleverancier voor respiratoire zorg

De specialist in long- en slaapzorg



Westfalen
Medical

Inhoud

- 03 Voorwoord
- 04 Uw partner in respiratoire zorg
- 06 Stationaire concentratoren
- 07 Mobiele concentratoren
- 09 Vloeibare zuurstof in vaten en strollers
- 11 Zuurstofcilinder met drukregelaars
- 13 COMFY®
- 14 Vernevel- en PEP-therapie
- 16 Nasal High Flow Therapie
- 17 PAP-therapie
- 19 Verbruiks- en comfortartikelen
- 20 Trainingen
- 22 De kwaliteit van Westfalen Medical
- 23 Zorgportaal
- 25 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
- 26 Westfalen

Voorwoord

Westfalen Medical is onderdeel van de Westfalen Groep en is gevestigd in Deventer, Overijssel. Voor verpleeghuizen, hulpdiensten, huisartsen, ziekenhuizen en de offshore leveren wij diensten en producten op het gebied van zuurstof-, vernevel-, Nasal High Flow-, PEP-, en PAP-therapie.

Onze missie

Westfalen Medical is gericht op het bieden van hoogwaardige producten, het ontzorgen van de organisaties, verfijnde oplossingen bieden aan de uiterst kritische zorgverleners binnen het speelveld van de gezondheidszorg en het op maat leveren van service en diensten.

Onze visie

Ten grondslag aan onze missie ligt onze visie. Wij vatten die samen in 3 kernbegrippen:

1. Wakker zijn

We zijn voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied. Daar staan we niet alleen voor open, we denken ook vooruit en luisteren naar onze klanten. Zij zijn het referentiekader dat ons scherp houdt en ons uitdaagt om op een innovatieve manier vorm te geven aan beide: het welzijn van onze klanten en de toekomst van ons bedrijf.

2. Vitaliteit

We doen ons werk met plezier en enthousiasme in een omgeving met ruimte voor nieuwe initiatieven. De impuls die daarvan uitgaat zorgt voor energie en teamspirit. Nemen we een beslissing dan doen we dat weloverwogen en staan we achter de uitwerking. De obstakels die we onderweg tegenkomen zien we als uitdagingen om te overwinnen. Met doorzettingsvermogen willen we eigen en gemeenschappelijke doelstellingen realiseren.

3. Betrokkenheid

We streven naar een duurzame relatie met onze klanten. Een band die is opgebouwd uit waardering en vertrouwen. In die relatie is luisteren belangrijk. Om te begrijpen wat mensen bezighoudt en wat ze belangrijk vinden. Om samen te bepalen welke hulp waar en op welke manier het best tot zijn recht komt.

Uw partner in respiratoire zorg

U wilt het beste voor uw cliënten. Dat willen wij ook. Daarom leveren wij altijd hoogwaardige apparatuur die niet alleen van de hoogste kwaliteit is, maar ook veilig. Hierdoor zijn uw cliënten altijd in goede handen.

Bij ons kunt u terecht voor alles op het gebied van long- en slaapzorg:

- Zuurstoftherapie
- Verneveltherapie
- Nasal High Flow Therapie
- PEP-therapie
- PAP-therapie (slaapapneu)

Daarnaast bieden wij alle benodigde verbruiksartikelen aan voor een optimale toepassing van deze therapieën.

Uitstekende service en expertise

Bij ons staat hoogwaardige service en een hoog kennisniveau centraal. Ons deskundige team biedt u altijd de meest optimale ondersteuning. Met onze uitgebreide ervaring en expertise in respiratoire zorg, helpen wij u de hoogste kwaliteit zorg aan uw cliënten te garanderen.

Betrouwbare samenwerking

Als uw vaste partner zijn wij altijd bereikbaar en bieden wij uitstekende service. Toch blijven we streven naar verbetering. U heeft één vaste contactpersoon en binnen kantooruren staat onze Sales Support altijd voor u klaar. We geven (periodiek) training aan uw personeel, afgestemd op uw specifieke behoeften, zodat uw team altijd up-to-date is met de nieuwste technieken en procedures.

Maatwerkoplossingen op basis van gratis inventarisaties

Wij begrijpen dat iedere zorginstelling uniek is. Daarom bieden wij maatwerkoplossingen op basis van grondige inventarisaties die wij kosteloos uitvoeren. Hierdoor kunnen we precies inspelen op uw specifieke behoeften

en omstandigheden. Dit leidt tot efficiëntere zorg en betere resultaten voor uw cliënten. U kunt altijd met ons in overleg gaan indien u iets anders voor uw cliënt wenst.

Digitaal portaal voor gemakkelijk beheer

Om het u nog gemakkelijker te maken, kunnen wij, indien gewenst, voorzien in een digitaal portaal. Via dit portaal kunt u bestellingen plaatsen, retouren aanmelden en een overzicht vinden van alle uitstaande cilinders binnen uw organisatie. Deze service bieden wij u kosteloos aan, zodat u altijd overzicht en controle heeft over uw voorraad en bestellingen.

Altijd de juiste voorraad

Voorraadbeheer? Laat dat maar aan ons over. Wij kunnen dit volledig van u overnemen als u dat prettig vindt. Wij zorgen altijd voor een passende, specifieke oplossing, zodat u altijd voorraad heeft die is afgestemd op uw verbruik. Dit kan leiden tot een aanzienlijke voorraadreductie en besparing voor uw instelling.

Wat u van ons kunt verwachten

Wij begrijpen dat u benieuwd bent hoe alles werkt en wat u van ons kunt verwachten. Bij ons krijgt u niet alleen de beste apparatuur, maar ook de beste ondersteuning. Van levering tot voorraadbeheer en van trainingen tot onderhoud. Wij zorgen ervoor dat u en uw cliënten altijd op ons kunnen rekenen. Neem vandaag nog contact op met ons om te ontdekken hoe wij u kunnen ondersteunen in het bieden van de beste zorg aan uw cliënten. Samen bouwen we aan een betrouwbare en efficiënte zorgomgeving.




Stationaire zuurstofconcentratoren



Stationaire zuurstofconcentratoren zijn medische hulpmiddelen die zuurstof uit de omgevingslucht halen en deze zuurstof concentreren. Ze zijn ontworpen voor langdurig gebruik op één plek en bieden een betrouwbare

en constante toevoer van zuurstof aan patiënten. Onderstaande modellen zijn beschikbaar voor aankoop. Daarnaast bieden wij diverse andere modellen aan voor verhuur. Scan hiervoor de QR-code.

DeVilbiss 525

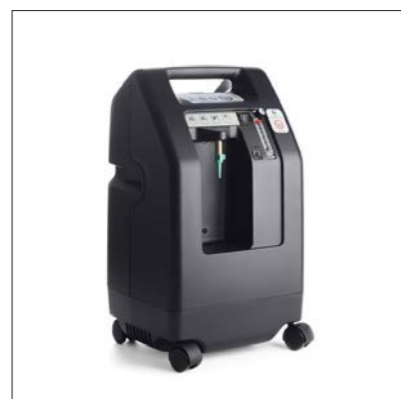

Eenheid	
Gewicht	21 kg
Afmeting B x L x H	30,5 x 38,1 x 58,4 cm
Geluidsniveau	39,5 dB
Flowbereik	0 - 5 liter
Verbruik per uur	0,30 kw/uur
Verbruik per dag	7,2 kw

Everflo



Eenheid	
Gewicht	14 kg
Afmeting B x L x H	38,1 x 24,1 x 58,4 cm
Geluidsniveau	45 dB
Flowbereik	0,5 - 5 liter
Verbruik per uur	0,30 kw/uur
Verbruik per dag	7,2 kw

DeVilbiss 1025



Eenheid	
Gewicht	19 kg
Afmeting B x L x H	34,2 x 30,4 x 62,2 cm
Geluidsniveau	59 dB
Flowbereik	2 - 10 liter
Verbruik per uur	0,664 kw/uur
Verbruik per dag	15,9 kw

Mobiele concentratoren



Mobiele concentratoren zijn medische hulpmiddelen die zuurstof uit de omgevingslucht halen en deze zuurstof concentreren. Ze zijn ontworpen voor gebruik onderweg en bieden uw cliënten de vrijheid om te reizen en actief te blijven. Deze concentratoren zijn lichtgewicht, accu-aangedreven en gemakkelijk mee te nemen.

Onderstaande modellen zijn beschikbaar voor aankoop en huur. Daarnaast bieden wij diverse andere modellen en accu's aan voor verkoop en verhuur. Scan hiervoor de QR-code.

Raadpleeg onze Sales Support afdeling voor deskundig advies over de inzet van de mobiele concentratoren bij uw cliënten.

Eclipse 5



Flowinstelling	Gebruikstijd
0,5 (continu)	4 uur en 20 min
1 (continu)	3 uur en 40 min
1,5 (continu)	2 uur en 40 min
2 (continu)	2 uur
2,5 (continu)	1 uur en 40 min
3 (continu)	1 uur en 20 min
1 (demand)	5 uur en 20 min
2 (demand)	5 uur en 10 min
3 (demand)	4 uur en 40 min
4 (demand)	4 uur
5 (demand)	3 uur en 40 min
6 (demand)	3 uur en 30 min

Eenheid	
Oplaadtijd accu	5 uur
Gewicht incl. accu	8,3 kg
Afmeting B x L x H Incl. trolley	31,2 x 18 x 49 cm
Geluidsniveau	38 dB op stand 2 (demand)

Zen O (24 cell)



Flowinstelling	Gebruikstijd
0,5 (continu)	5 uur en 40 min
1 (continu)	3 uur en 10 min
1,5 (continu)	2 uur en 10 min
2 (continu)	1 uur en 10 min
1 (demand)	7 uur en 40 min
2 (demand)	7 uur en 20 min
3 (demand)	5 uur en 40 min
4 (demand)	4 uur en 10 min
5 (demand)	3 uur en 40 min
6 (demand)	3 uur en 10 min

Eenheid	
Oplaadtijd accu	6 uur
Gewicht incl. accu	5,3 kg
Afmeting B x L x H Incl. trolley	21,2 x 16,8 x 31,3 cm
Geluidsniveau	38 dB op stand 2 (demand)

Rove 6 (16 cell)



Flowinstelling	Gebruikstijd
1 (demand)	12 uur en 45 min
2 (demand)	10 uur en 15 min
3 (demand)	6 uur en 30 min
4 (demand)	5 uur en 15 min
5 (demand)	3 uur en 30 min
6 (demand)	2 uur en 30 min

Eenheid	
Oplaadtijd accu	4 uur
Gewicht incl. accu	2,6 kg
Afmeting B x L x H	8,3 x 18,3 x 22,9 cm
Geluidsniveau	39 dB op stand 2 (MDS-Hi)

Informatie en instructievideo's over het onderhoud en gebruik zijn te vinden op onze website. Scan hiervoor de QR-code.



On demand systeem: geeft zuurstof af bij een goede neusademhaling.
Continu systeem: geeft continu zuurstof af, ongeacht de ademhaling.

Let op: Gebruikstijd is bij benadering en afhankelijk van omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld de buitentemperatuur.

Vloeibare zuurstof



Vloeibare zuurstof in vaten en strollers



Wat is vloeibare zuurstof?

Vloeibare zuurstof is zuurstof die bij zeer lage temperaturen wordt opgeslagen in een vloeibare toestand. Dit maakt het mogelijk om grote hoeveelheden zuurstof compact en efficiënt op te slaan en te vervoeren. Daarnaast bieden de strollers meer vrijheid aan uw cliënten, doordat deze lichter en compacter zijn dan traditionele cilinders. Vloeibare zuurstof is een medicijn en alleen verkrijgbaar op recept.

Ons assortiment omvat topfill vaten en strollers.

Bij de topfill vaten bevindt de vulopening zich aan de bovenzijde. Om de stroller te vullen, plaatst u deze boven op de vulopening. Voor deskundig advies kunt u altijd terecht

bij onze Sales Support afdeling.

Een stroller is een draagbaar, lichtgewicht apparaat dat wordt gebruikt in combinatie met een vloeibaar zuurstofvat. Aangezien de stroller is ontworpen om gemakkelijk te vervoeren, biedt het uw cliënten mobiliteit en flexibiliteit, waardoor ze actief kunnen blijven, zonder concessies te doen aan hun gezondheid.

Onderstaande modellen zijn beschikbaar voor huur. Daarnaast bieden wij diverse andere vloeibare vaten en strollers aan.

Scan hiervoor de QR-code.

Liberator Topfill 37 en 45 L



Liberator Topfill

Het Liberator vat is gevuld met vloeibare zuurstof. Het vat staat op wielen, hierdoor is het makkelijk verrijdbaar.

Strollers die geschikt zijn voor gebruik bij het Liberator vat zijn:

- Liberator Topfill
- Helios H-850
- Helios H-300
- Companion C-1000

Liberator Topfill



Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25 (continu)	1 dag en 8 uur
0,5 (continu)	21 uur
0,75 (continu)	16 uur
1 (continu)	13 uur
1,5 (continu)	9 uur
2 (continu)	7 uur
2,5 (continu)	6 uur
3 (continu)	5 uur
4 (continu)	4 uur
5 (continu)	3 uur en 20 min
6 (continu)	2 uur en 40 min

Eenheid	
Hoogte	33,5 cm
Gewicht leeg	2,27 kg
Gewicht vol	3,60 kg

Companion C-1000 Topfill



Flowinstelling	Gebruikstijd
0,25 (continu)	1 dag en 5 uur
0,5 (continu)	20 uur
0,75 (continu)	16 uur
1 (continu)	13 uur
1,5 (continu)	9 uur
2 (continu)	7 uur
2,5 (continu)	6 uur
3 (continu)	5 uur
4 (continu)	3 uur en 50 min
5 (continu)	3 uur
6 (continu)	2 uur en 30 min

Eenheid	
Hoogte	34,5 cm
Gewicht leeg	2,27 kg
Gewicht vol	3,70 kg



Zuurstofcilinder met geïntegreerde drukregelaar (2 en 10 liter)



Wat zijn zuurstofcilinders met geïntegreerde afsluiters?

Zuurstofcilinders met geïntegreerde afsluiters zijn geavanceerde zuurstofopslagsystemen die een drukregelaar en flowmeter direct in de cilinderkop hebben ingebouwd. Door dit innovatieve ontwerp is er een verminderde kans op lekkages door onjuiste aansluitingen. Zuurstof uit een zuurstofcilinder is een medicijn en alleen verkrijgbaar op recept.

De 2 liter zuurstof cilinder wordt voornamelijk ingezet als mobiliteitsvoorziening. De 10 liter zuurstofcilinder wordt gebruikt als noodvoorziening.

Wij raden u aan om per gebruiker van een stationaire concentrator een 10 liter noodcilinder op voorraad te hebben.

Hierop kan uw cliënt terugvallen indien de stroom uitvalt of het apparaat defect is. Uw cliënt komt hierdoor niet zonder zuurstof te zitten en hebben wij voldoende tijd om het probleem te verhelpen.

De 10 liter zuurstofcilinder wordt eveneens ingezet voor cliënten met clusterhoofdpijn.

Bij de 10 liter zuurstofcilinder kunnen wij een cilinder steekwagen leveren. Deze kunt u kopen of huren.

Let op: We leveren standaard zuurstofcilinders met een geïntegreerde afsluiter, zodat er veilig en efficiënt gewerkt kan worden. Wilt u graag een cilinder met een los reduceertoestel ontvangen? Geef dit dan aan bij het plaatsen van uw bestelling.

2 liter



Flowinstelling	Gebruikstijd
0,5	12 uur
1	6 uur
2	3 uur
3	2 uur
4	1 uur en 30 min
5	1 uur en 15 min
6	1 uur
7	50 min
8	45 min
9	40 min
10	35 min
12	30 min
15	20 min

Eenheid	
Hoogte	50,5 cm
Gewicht	4 kg
Diameter	10 cm

10 liter



Flowinstelling	Gebruikstijd
0,5	60 uur
1	30 uur
2	15 uur
3	10 uur
4	8 uur
5	6 uur en 15 min
6	5 uur
7	4 uur en 30 min
8	4 uur
9	3 uur en 30 min
10	3 uur
12	2 uur en 30 min
15	2 uur

Eenheid	
Hoogte	108 cm
Gewicht	15,5 kg
Diameter	14 cm

Let op: Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie. Dit kan per cilinder variëren.

COMFY[®] het digitale ventiel voor optimaal zuurstofgebruik

Zonder te rekenen, altijd weten hoeveel zuurstof er nog in de cilinder zit.



COMFY[®]

Bij ons staat de zorg voor uw cliënten centraal. Daarom bieden wij naast de traditionele zuurstofcilinders met geïntegreerde afsluiter nu ook een digitale versie aan. Deze geavanceerde oplossingen zijn ontworpen om de zuurstofvoorziening in uw zorginstelling nog efficiënter, veiliger en gebruiksvriendelijker te maken, zodat u de tijd krijgt om te doen wat echt belangrijk is.

Voordelen van zuurstofcilinders met het digitale COMFY[®] ventiel

1. Gebruiksgemak

U hoeft zelf niet meer te rekenen. U krijgt een exacte weergave van de hoeveelheid zuurstof, de resterende gebruikstijd en de cilinderdruk. Dit wordt duidelijk aangegeven op het digitale display. Hierdoor weet u altijd hoe groot uw zuurstofvoorraad is.

2. Veiligheid

Zodra de inhoud van de cilinder onder een kwart zakt en kort voordat de cilinder leeg is, krijgt u een alarmsignaal. Hierdoor bent u altijd op tijd voor het bestellen van een nieuwe cilinder. Daarnaast beschikt de COMFY[®] over een ophangstelsel, zodat deze veilig opgehangen kan worden.

3. Kostenbesparing

Met de COMFY[®] gaat u efficiënter met uw zuurstof om. Ervaring leert dat wij cilinders terugkrijgen die nog meer dan de helft aan zuurstof bevatten. Dit kan gereduceerd worden, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van iedere druppel zuurstof.

4. Duurzaamheid

Door optimaal gebruik van de zuurstof in de cilinder, heeft u minder zuurstofcilinders nodig, minder transport en minder opslagruimte.

Scan voor meer informatie de QR-code.

Vernevel- en PEP-therapie

Wat is verneveltherapie?

Verneveltherapie is een behandelmethodede waarbij medicatie wordt omgezet in een fijne mist die via een vernevelaar wordt ingeademd. Hierdoor bereikt de medicatie direct de luchtwegen en longen, wat zorgt voor een snelle en effectieve verlichting van symptomen.

Onderstaande producten zijn te koop, niet te huur.

Naast deze producten bieden wij diverse andere vernevelaars en PEP-apparaten aan. Scan hiervoor de QR-code.

Wat is PEP-therapie?

PEP staat voor Positive Expiratory Pressure, oftewel positieve expiratoire druk. Bij chronische luchtwegklachten zoals COPD, astma, bronchiëctasieën en Cystic Fybrose kan PEP-therapie verlichting bieden. PEP-therapie werkt door uitademen tegen een lichte weerstand in een PEP-apparaat, wat de luchtwegen open houdt en slijm helpt loskomen. Het slijm wordt als het ware los getrild waarna het gemakkelijker kan worden opgehoest.

PARI BOY Classic



Eenheid	Aantal/soort/cm/volt
Vernevelfrequentie	1 of 2 x daags 1 ampul
Vernevelaar	LC Sprint, LC Plus, LC Star
Afmeting B x L x H	18,2 x 15,0 x 13,0 cm
Stroomvoorziening	220 - 240V

PARI-O-PEP



Eenheid	Cm / gram
Soort PEP	Oscillerende PEP
Afmeting B x L x H	5 x 13 x 3 cm
Gewicht	60 gr

Acapella choice



Eenheid	Cm / gram
Soort PEP	Oscillerende PEP
Afmeting L	15 cm
Gewicht	100 gr



Verneveltherapie



PEP-therapie



Nasal High Flow Therapie



Wat is Nasal High Flow Therapie?

Bij Nasal High Flow Therapie krijgt uw cliënt een hoge luchtstroom met een luchtvochtigheid van 100% toegediend die diep binnendringt in de onderste luchtwegen. Hierdoor wordt het slijm in de luchtwegen soepeler, waardoor het gemakkelijker op te hoesten is.

Aangezien er minder slijm in de luchtwegen achterblijft, vermindert de kans op infecties. Dit resulteert in minder symptomen, minder medicatie en minder ziekenhuisopnames.

Voor meer informatie scan de QR-code.



myAIRVO2



Eenheid	
Therapie	Nasal High Flow Therapie
Afmeting B x L x H	29,5 x 17 x 17,5 cm
Gewicht	2,2 kg (apparaat) 3,4 kg (incl. tas en accessoires)
Watercapaciteit	560 ml
Opwarmtijd	Tot 31°C = 10 min Tot 37°C = 30 min
Stroomvoorziening	100 - 240V
Flowbereik	10 - 60 L/min

PAP-therapie



PAP staat voor Positieve Airway Pressure, oftewel positieve luchtweg druk. PAP-therapie is een behandelmethodede die wordt gebruikt om ademhalingsproblemen te verlichten bij cliënten met slaapapneu. Het apparaat blaast lucht onder druk door een masker naar de luchtwegen, waardoor deze openblijven tijdens de slaap.

- **CPAP (Continuous Positive Airway Pressure):** Dit is de meest voorkomende vorm van PAP-therapie en levert een constante luchtstroom om de luchtwegen open te houden.

- **BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure):** Dit apparaat biedt twee verschillende drukniveaus. Een hogere druk bij inademen en een lagere druk bij uitademing, wat comfortabeler kan zijn voor sommige cliënten.
- **APAP (Automatic Positive Airway Pressure):** Uw apparaat past de druk automatisch aan op basis van de ademhalingsbehoefte van uw cliënt gedurende de nacht.

Wij bieden naast de onderstaande producten ook andere PAP-apparaten aan. Scan hiervoor de QR-code.

ResMed AirSense 11



Eenheid	
Therapie	CPAP, APAP, en For Her instelling
Afmeting B x L x H	25,9 x 13,9 x 9,5 cm
Gewicht	1,13 kg
Watercapaciteit	380 ml
Druk	4 - 20 cm H2O
Stroomvoorziening	100 - 240V

Philips DreamStation 2



Eenheid	
Therapie	CPAP
Afmeting B x L x H	15,8 x 25,7 x 8,5 cm
Gewicht	1,34 kg
Watercapaciteit	325 ml
Druk	4 - 20 cm H2O
Stroomvoorziening	100 - 240V

Löwenstein Prisma SMART Max



Eenheid	
Therapie	CPAP, APAP
Afmeting B x L x H	17 x 18 x 13,5 cm
Gewicht	1,34 kg
Watercapaciteit	400 ml
Druk	4 - 20 cm H2O
Stroomvoorziening	100 - 240V



Verbruiks- en comfortartikelen



Westfalen Medical biedt een uitgebreid assortiment verbruiks- en comfortartikelen aan, speciaal afgestemd op de behoeften van zorginstellingen en hun cliënten. Denk hierbij aan diverse type neusbrillen, maskers en oorbeschermers.

Maar ook aan extra accu's en draagtassen voor mobiele zuurstofconcentratoren, wangplakkers, saturatiemeters en neusgel. Scan de QR-code voor ons gehele assortiment.

Neusbril



Draagtas



Saturatiemeter



Neusgel



Zuurstofslang
(anti knik)



Wangplakkers



Trainingen van Westfalen Medical



Trainingen voor zorginstellingen

Wij bieden deskundige trainingen aan op locatie of digitaal.

Deze trainingen zijn speciaal ontworpen om uw zorgverleners te ondersteunen bij het gebruik van onze materialen en toepassingen en geven wij advies over het opslaan van onze apparatuur. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Voorbeelden van trainingen:

- digitale trainingen
- fysieke trainingen
- fysieke BIG geaccrediteerde scholingen
- online video's met instructies



Scan de QR-code voor meer informatie.

De kwaliteit van Westfalen Medical

Westfalen Medical; de totaalleverancier van respiratoire zorg.

Wij zorgen voor een soepele, snelle en vertrouwde levering van de benodigde apparatuur. Wij ontzorgen, begeleiden en ondersteunen u waar mogelijk.

Bij Westfalen Medical vindt u alles onder één dak als het gaat om respiratoire therapieën. Voor elke therapie bent u bij ons aan het juiste adres en durven we hardop te zeggen: Onder ons dak ontmoet de professional de professional. Wat een verademing.

Westfalen Medical

- KNMP Verklaring, verklaring betrouwbare toeleverancier
- ISO 9001:2015
- ISO 27001:2013
- GMP/GDP
- 10 depots verdeeld over Nederland

Waar u bij Westfalen Medical op mag rekenen:

- Eén aanspreekpunt voor zuurstof-, vernevel-, Nasal High Flow-, PEP- en PAP therapie.
- Uw eigen vaste accountmanager/sparring-partner.
- Landelijke dekking.
- Uitgebreid assortiment van apparatuur voor alle respiratoire aandoeningen.
- Snelle levering.

Wilt u meer weten?

Begint een mooie samenwerking niet met een verkennend praatje? Neem gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch op 0570 - 858 404 of via verkoop@westfalenmedical.nl.

Zorgportaal

Wilt u inzicht hebben in uw facturen en bestellingen? Wij hebben een zorgportaal waarin alles overzichtelijk onder elkaar staat. Uw accountmanager helpt u graag bij het aanmaken van een account en de inrichting hiervan.

Wilt u eerst graag zien hoe onze digitale omgeving eruitziet en werkt? Maak dan een afspraak met één van onze accountmanagers voor een vrijblijvende demonstratie.



Welkom bij Mijn Westfalen Inloggen

E-mailadres *

Wachtwoord *

Inloggen

Blijf ingelogd

[Wachtwoord vergeten?](#)

Heeft u nog geen account?

Maak dan binnen enkele minuten uw Mijn Westfalen account aan. [Account aanmaken](#) →

Westfalen Medical

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Iedereen roept het tegenwoordig. Maar wij doen het ook echt. Sterker nog: duurzaamheid is ons op het lijf geschreven. Hoe dat er voor ons uitziet? We kijken om naar onze medemens. Met zorg en aandacht. We maken weloverwogen keuzes als het gaat om het milieu.

Mens

Oprechte zorg bieden aan een kwetsbare groep in onze samenleving. Dát is waar wij iedere dag ons bed voor uitkomen. Met al onze aandacht helpen we cliënten dagelijks met medicinale zuurstof. Of andere therapieën voor respiratoire aandoeningen. Onze medewerkers? Zij zijn de stuwende krachten achter Westfalen Medical. Daarom investeren we in de beste arbeidsomstandigheden en opleidingen. En kijken we écht naar elkaar om. Met aandacht voor elkaar noemen we dat. Wil je als medewerker graag thuiswerken? Bij ons krijg je die ruimte. Ook stimuleren we de gezondheid van onze medewerkers. Hoe? Met ons fietsplan voor collega's binnen de regio Deventer als mooi voorbeeld. Dit stimuleert beweging. Hierdoor dragen we bij aan hun fysieke gezondheid. Dat is waar wij het voor doen. Maar ook reduceren wij de CO₂-uitstoot doordat meer medewerkers hun auto laten staan. Win-win noemen we dat.

Milieu

Onze omgeving, daar zijn we zuinig op. Daarom zijn we iedere dag bezig met het beperken van onze CO₂-uitstoot. Hoe? Door onze grootschalige inzet van telemonitoring bijvoorbeeld. Dit zetten we bij zoveel mogelijk therapieën in. De apparatuur geeft automatisch de waarden door. Valt ons iets op, dan nemen wij direct telefonisch contact op met de zorg om het probleem op te lossen. Zo zijn er veel minder fysieke afspraken nodig. Dit betekent minder ritten naar de cliënt en dus minder CO₂-uitstoot.

Maar dat is niet alles. We zetten lichte composiet cilinders in, die door hun duurzame materiaal een langdurige gebruiksduur bieden. Deze worden onder hoge druk gevuld. Hierdoor hebben onze klanten minder voorraad nodig. Minder transportbewegingen betekent ook weer minder CO₂-uitstoot. En we kunnen meerdere klanten bedienen met dezelfde bus. Wel zo makkelijk.

Maatschappij

Wij gaan verder dan alleen maar denken aan milieu, klanten en medewerkers. Zo is jong talent bij ons ook van harte welkom. Zij zijn immers onze toekomst.

EcoVadis

Van alternatieve aandrijfenergie tot waterstof, milieuvriendelijke koudemiddelen en warmte op basis van elektriciteit. In het kader van de groene transitie stapt de Westfalen Groep steeds meer af van fossiele brandstoffen en richt zij zich meer op een duurzame toekomst.

EcoVadis, 's werelds grootste aanbieder van duurzaamheidsranglijsten voor bedrijven, heeft Westfalen een platina medaille toegekend voor deze inzet. De Westfalen Groep behoort daarmee tot de top 1% van alle beoordeelde bedrijven. De beoordeling weerspiegelt ons strategische werk op het gebied van duurzaamheid en versterkt tegelijkertijd onze positie in de markt in een tijd waarin klanten en werknemers steeds meer waarde hechten aan het werken met en bij bedrijven die duurzaam opereren.



Westfalen

De geschiedenis van ons bedrijf start in 1923 met de oprichting van „Sauerstoffwerke A.G.“ in het Duitse Munster. Westfalen is een niet beursgenoteerd familiebedrijf.

Oprichting Westfalen Medical Deventer in 2011.



Hoofdkantoor Westfalen groep in Munster, Duitsland.

Dé totaal-
leverancier
in respiratoire
therapieën.

- Zuurstoftherapie
- Verneveltherapie
- Nasal High Flow Therapie
- PEP-therapie
- PAP-therapie
- Slaappositietherapie

6 landen in Europa

Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk

Onze locaties

Duitsland

Westfalen AG
Munster
Westfalen Medical GmbH
Siegen

Nederland

Westfalen Gassen Nederland BV
Westfalen Medical BV
Deventer

België

Westfalen BV-SRL
Aalst/Alost

Frankrijk


Westfalen France S.A.R.L.
Rosselange


Oostenrijk

Westfalen Austria GmbH
Gramatneusiedl

Zwitserland

Westfalen Gas Switzerland GmbH
Eiken

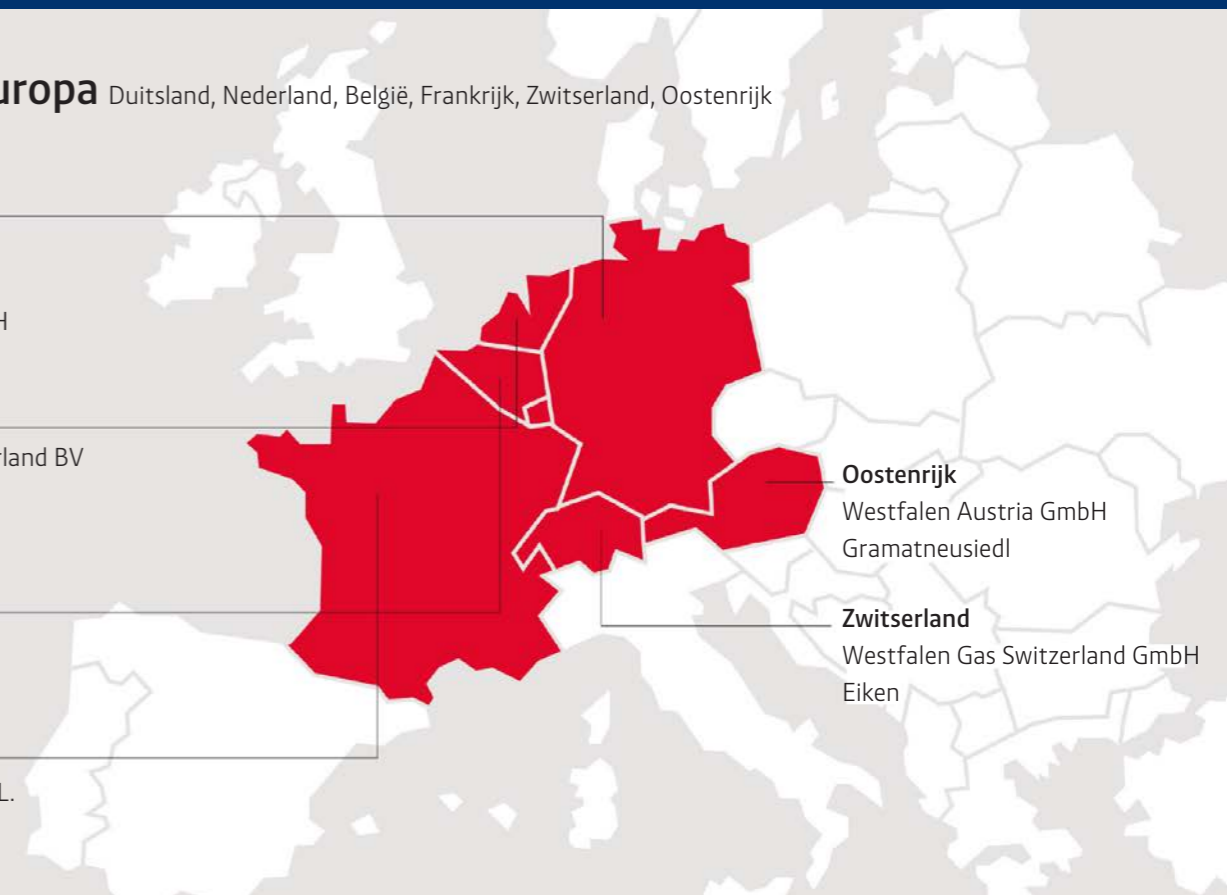

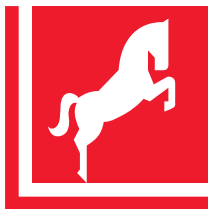

Nieuwsgierig geworden?

Bel uw accountmanager of neem contact op met Sales Support.

Tel. 0570 - 858 404
verkoop@westfalenmedical.nl

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer

Westfalen
Medical