

Night Shift

Gebruiks- en onderhoudsinstructies

Westfalen
Medical

Gebruiksaanwijzing Night Shift

Voor een goede werking van de Night Shift is het belangrijk dat u het apparaat op de juiste manier gebruikt. In deze brochure leest u stap voor stap hoe u dat moet doen.

Belangrijk om te weten

- Zorg ervoor dat u het apparaat helemaal oplaadt voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
- De batterij dient u minimaal eenmaal per drie dagen op te laden.
- Zodra de Night Shift herkent dat u op uw rug slaapt, zal hij gaan vibreren met toenemende intensiteit. Dit doet hij totdat u op uw zij gaat liggen.
- Zorg ervoor dat de borstband niet te los wordt gedragen. Dit kan zorgen voor een verkeerde herkenning van uw slaappositie.

De borstband plaatsen

01 Bevestig de Night Shift aan de borstband door de twee klittenbandsluitingen in de openingen aan beide kanten van het apparaat te steken.



02 Pas de lengte van de borstband aan zodat de Night Shift in het midden van uw borst blijft en niet verschuift als u slaapt. U kunt de borstband over uw nachtkleding dragen.



03 Met het blauwe label met de goede kant naar boven centreert u de Night Shift op uw borst. Het blauwe Night Shift logo moet van de borst af zijn gericht en rechtop leesbaar, zodat de aan/uit knop naar de onderkant is gericht.





Voorbereiden op een optimale nachtrust

01 15 minuten na het inschakelen van de sensor begint de behandeling.

02 Zodra de sensor vibreert dient u op uw zij te gaan liggen.



Schoonmaakinstructies

- Het is belangrijk dat u de Night Shift regelmatig goed schoonmaakt.
- De borstband kunt u afwassen in een sopje van warm water en een beetje mild afwasmiddel. Schud de borstband één a twee minuten lichtjes in het sopje. Spoel de borstband vervolgens af met warm water. Droog het vervolgens af met keukenpapier.
- De Night Shift kunt u het beste afnemen met een vochtig alcoholdoekje. Zorg ervoor dat de hele sensor wordt schoongemaakt. Laat de sensor drogen aan de lucht.
- Let op! Zorg ervoor dat de band en de Night Shift voor gebruik volledig droog zijn.

Opladen Night Shift



LED-indicatoren terwijl de Night Shift oplaadt		
Aan het opladen	Groene LED aan	LED zal uitgaan na 3 uur wanneer volledig opgeladen
Oplaadfout	Groene en gele LED aan	Controleer de stroomvoorziening en de kabelaansluitingen
Toestel defect	Gele LED aan	Retourneer het apparaat voor onderhoud

LED-indicatoren na het aanzetten van de Night Shift		
Batterij opgeladen voor	LED indicatorpatroon	Vibratie feedback
3 nachten	Groene LED- 3x	3 keer
2 nachten	Groene LED- 2x	2 keer
1 nacht	Groene LED- 1x	1 keer
Moet opgeladen worden	Gele LED- 1x knipperen per seconde	1 keer per 5 seconden



Specificaties Night Shift

Nightshift	
Afmeting L x B x H	2,25 x 1,5 x 0,5
Oplaadtijd	2,5 uur
Gewicht	44 gram inclusief borstband en batterij
Materiaal borstband	Neoprene, Velcro, Aluminum



Heeft u nog vragen?

Wij bieden u diverse mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Op onze website geven wij bijvoorbeeld antwoord op veelgestelde vragen. Vindt u niet wat u zoekt neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

Contactgegevens

Tel. 0570 - 234 625

Fax 0570 - 858 451

slaapapneu@westfalen.com
cpapinfo.nl

Bestellen van producten

Stuur een e-mail met uw bestelling naar bestellen@westfalen.com.

Openingstijden


Maandag t/m vrijdag
08.00 uur tot 18.00 uur

**Bereikbaarheid
buiten openingstijden**

Tel. 0570 – 858 450

(uitsluitend voor spoedgevallen)



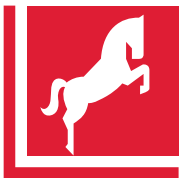

Westfalen Medical BV

Rijgsstraat 14
7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 234 625
Fax 0570 - 858 451

slaapapneu@westfalen.com
cpapinfo.nl

Westfalen
Medical