



Prisma SMART Max

Gebruiksaanwijzing

Westfalen
Medical



Een korte kennismaking

Prisma SMART Max

De Prisma SMART Max is een PAP-apparaat dat wordt gebruikt voor de behandeling van slaapapneu. U ontvangt van ons bij het apparaat standaard een luchtbevochtiger en, indien gewenst, een verwarmde slang.

Makkelijke bediening

Doordat het apparaat is voorzien van een groot digitaal display is de bediening eenvoudig. Via slechts enkele knoppen op het display krijgt u direct toegang tot alle functies.

Licht van gewicht

De Prisma SMART Max weegt 1,34 kg en is een compact apparaat dat in de meegeleverde draagtas eenvoudig mee te nemen is.

Stil in gebruik

Een groot voordeel van de Prisma SMART Max is dat het apparaat tijdens gebruik erg stil is.

Wanneer u de instructies leest en het apparaat met zorg behandelt, zult u veel plezier hebben van de Prisma SMART Max.


Gebruiksaanwijzing Prisma SMART Max





Schematisch overzicht

1. Bevochtiger met afdekkap
2. Ontgrendelingstoets
3. Digitaal display
4. Handvat
5. Filterruiimte
6. Aansluitpunt AC adapter
7. Slang
8. SD-kaart ingang
9. AC adapter
10. SD-kaart
11. Luchtuitlaat poort

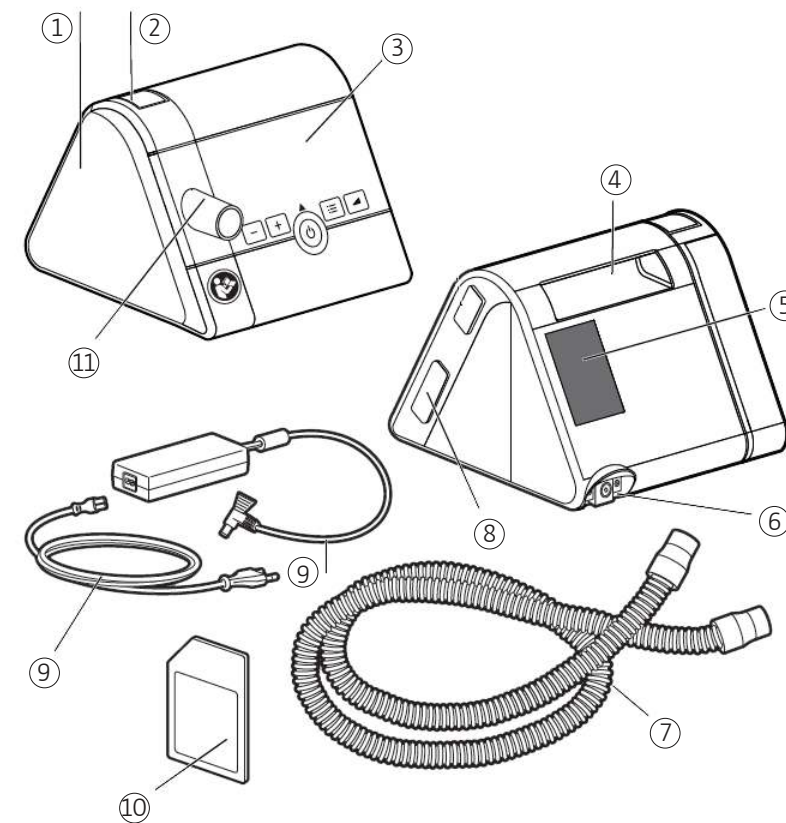

Bediening

Stand: Aan

Het apparaat staat aan en de therapie kan gestart worden.

Stand: Stand-by


Het apparaat is uit. Door kort op de in- uitschakeltoets te drukken, is het apparaat direct klaar voor gebruik. Het is mogelijk om instellingen te wijzigen als het apparaat in de stand-by modus staat.

Stand: Uit

Het apparaat is uitgeschakeld. Er zijn geen instellingen mogelijk en het display blijft donker.

Bedieningstoetsen op het display

- 1. -toets
- 2. +toets
- 3. Aan/uit-toets
- 4. Menutoets
- 5. softSTART-toets

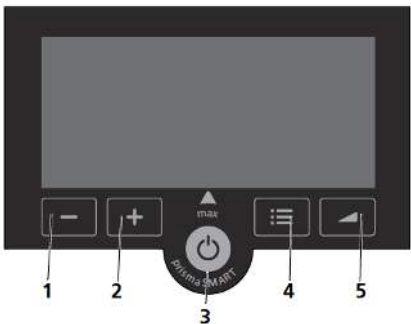

Menu instellingen

Werkwijze van de toetsen

De toetsen van het apparaat kunnen verschillende functies hebben.

Wanneer er in het display een symbool boven de toets staat (bijv. boven de softSTART-toets), neemt de toets de functie van het betreffende symbool aan.

Als er geen symbool boven de toets staat (bijv. bij de toets), behoudt de toets zijn oorspronkelijke functie.



In het menu bladeren

Om in het menu te bladeren dient het apparaat in de stand-by modus staan.

- 1. Menutoets indrukken.
- 2. Om het instellingenmenu te openen: indrukken.

Functietoets	Beschrijving
	Verder bladeren in het menu
	Terug bladeren in het menu
	Waarde verhogen
	Waarde verlagen
	Waarde bevestigen
	Waarde afkeuren
	Menu verlaten. Terug naar startscherm
	softSTART-symbool

Gebruiksaanwijzing

Therapie starten

1. Wanneer het display donker is drukt u kort op een willekeurige toets. Het apparaat schakelt in de stand-by modus.
2. Aan/uit-toets kort indrukken. Of, wanneer autoSTART is geactiveerd: adem in het masker. Op het display ziet u de actuele therapiedruk staan. De therapie begint.


AUTOstart

Als autoSTART is geactiveerd zal het apparaat, doordat u ademt in het masker, worden ingeschakeld.

Als u 5 seconden niet ademt, gaat het apparaat automatisch uit. Schakel autoSTART op OFF om deze functie uit te zetten.

Luchtbevochtiger

Welke stand (of afstelling) voor u het beste is, hangt af van de kamertemperatuur en de luchtvochtigheid. Heeft u 's ochtends droge luchtwegen? Zet de verwarmings-capaciteit een stand hoger. Staat er 's ochtends condens-water in de slang? Zet de verwarmingscapaciteit een stand lager. Indien het bevochtigingssymbool knippert, moet u de luchtbevochtiger met water bijvullen. Het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit als er te weinig water in de bevochtiger zit.

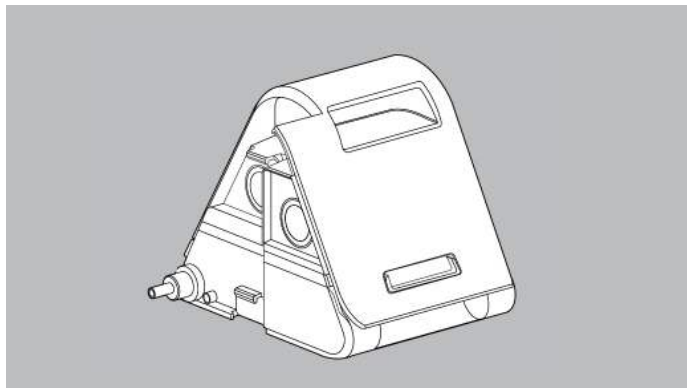

Luchtbevochtiger instellen

Op het display is het bevochtigingssymbool zichtbaar. Belangrijk is dat de luchtbevochtiger is aangesloten en gevuld met water.

1. Therapie starten. De luchtbevochtiger schakelt automatisch in. Het bevochtigingssymbool wordt groen.
2. Om de bevochtigerstand te verhogen: + toets indrukken.
3. Om de bevochtigerstand te verlagen: - toets indrukken.
4. Om de luchtbevochtiger uit te schakelen: - toets indrukken, tot 0 in het display verschijnt.



Therapie beëindigen

Druk de aan/uit-toets kort in. Of, wanneer autoSTART is geactiveerd, haal het masker van uw gezicht. Het apparaat laat vervolgens het aantal gebruiksuren zien en schakelt daarna in de stand-by modus.





Problemen en oplossingen

Problemen	Oorzaak	Oplossing
Geen loopgeluid, het display blijft zwart.	Het apparaat heeft geen stroom.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact en het apparaat zit.
De therapie kan niet door een ademhaling worden gestart.	De functie autoSTART is niet geactiveerd.	Graag de functie autoSTART activeren.
Na het afdoen van het masker gaat het apparaat niet, na circa 5 seconden, uit.	De functie autoSTART kan beperkt zijn.	Controleer of de functie autoSTART geactiveerd is. Zo niet, graag activeren.
softSTART kan niet worden ingeschakeld.	softSTART-functie is geblokkeerd.	Neem hiervoor contact met ons op.
Apparaat bereikt de ingestelde druk niet.	Luchtfilter is mogelijk vervuild.	Reinig het luchtfilter. Indien nodig: vervang het filter.
Masker geeft lekkage.	Het masker is vermoedelijk niet goed afgesteld.	Bij een kapot masker, masker vervangen. Let op: niet te strak aantrekken anders kan je striemen krijgen of nog meer lekkages veroorzaken. Trek de hoofdbanden wat strakker.
Apparaat geeft de melding "NO PIC" aan.	Apparaat is niet geconfigureerd voor de gegevensoverdracht.	Neem hiervoor contact met ons op.

Productspecificaties

Prisma SMART Max

Prisma SMART Max

Therapie	CPAP en APAP
Afmeting apparaat (B x L x H)	17 x 18 x 13,5 cm
Gewicht apparaat	1,34 kilo
Afmeting incl. bevochtiger (B x L x H)	31 x 18 x 13,5 cm
Gewicht incl. bevochtiger	1,94 kilo
Druk	4 - 20 cmh ₂ O
Stroomvoorziening	100 - 240 V



Heeft u nog vragen?

Wij bieden u diverse mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Op onze website geven wij bijvoorbeeld antwoord op veelgestelde vragen. Vindt u niet wat u zoekt neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

Telefoon- en faxnummer

Tel. 0570 - 234 625

Fax 0570 - 858 451

E-mailadres

cpapinfo@westfalen.com

Bestellen van producten

Stuur een e-mail met uw bestelling naar

cpapinfo@westfalen.com.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 08.00 uur tot 18.00 uur.

Bereikbaarheid buiten openingstijden

Tel. 0570 – 858 450 (uitsluitend voor spoedgevallen).





Westfalen Medical BV

Rijgstraat 14
7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 234 625
Fax 0570 - 858 451
www.cpapinfo.nl

cpapinfo@westfalen.com

Westfalen
Medical