


Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 858 404
oxyrunner@westfalen.com
westfalenmedical.com

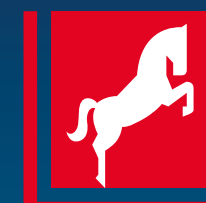

Oxyrunner®

Installatiehandleiding



Westfalen
Medical

Versie 06-2026 © Westfalen Medical BV

Westfalen
Medical



Onderdelen van de Oxyrunner®

Onderdelen
Oxyrunner®:

Onderdelen
eigen bezit:

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- Gordijnrail(s)
- Plafondsteunen
- Runners
- Zuurstofslang
- Eindstoppen
- Firesafe
- Railverbinders
- Kap plafondsteun

- I
- J
- Concentrator
- Neusbril



Installatie in 5 stappen

1

Vorbereiding

- › Haal alle onderdelen uit de verpakking en leg ze netjes naast elkaar neer.

2

Rail monteren

- › Kijk goed waar u de Oxyrunner® wilt plaatsen. Houd rekening met een beweegruimte van 3,5 meter naar links en rechts. Plaats de Oxyrunner® in het midden van de kamer(s) waarin u deze wilt gebruiken.
- › Teken nauwkeurig uit waar u de gaten moet boren in uw plafond. Controleer altijd eerst of er geen leidingen op deze locaties lopen.
- › Boor daarna de gaten om de plafondsteunen (B) vast te maken.
- › Druk de gordijnrail (A) stevig in de plafondsteunen (B) en draai ze vast met een schroevendraaier. Houd maximaal 1,5 meter tussen de bevestigingspunten. Draai ze pas volledig vast als de gordijnrails zijn ingeklikt.
- › Plaats per gordijnrail een railverbinder (G) om de stukken te verbinden.
- › Na het aandraaien kunt u de eindkap (H) erop drukken. Dit zorgt ervoor dat het geheel er mooier uitziet en de schroef niet zichtbaar is.
- › Houd aan het eindpunt minimaal 10 cm afstand tussen muur en rail voor het inschuiven van de Runners (C).

3

Runners plaatsen

- › Nadat de rail (A) is geplaatst, kunt u de Runners (C) gaan bevestigen. Deze zijn al kant-en-klaar gemaakt.
- › Plaats de Runners (C) op de zuurstofslang (D) en trek deze allemaal door tot het einde van de zuurstofslang (D).
- › Kijk goed hoeveel slang (D) u nodig heeft van de concentrator (I) tot het plafond. De concentrator plaatst u op een plek met voldoende ventilatie.
- › Plaats nu de Runners in de gordijnrails. De Runners (C) kunt u eenvoudig via de achterkant van de gordijnrails erin duwen. Duw nu alle Runners (C) erin.
- › Als de juiste afstand gevonden is, draait u de eerste Runner (C) vast met het schroefje op de achterkant van de Runner (C). Dit is de Runner het dichtst bij de concentrator.
- › Plaats hierna om de meter een nieuwe Runner (C) tot het einde van de gordijnrail (1). Zet elke Runner (C) steeds vast door het schroefje een klein beetje vast te draaien.
- › Bevestig na de laatste Runner (C) de eindstoppen voor en achter (E).

4

Firesafe plaatsen

- › Laat ongeveer 2 meter losse slang (D) over na de laatste Runner (C) en snijd of knip de slang (D) op de gewenste lengte af.
- › Plaats vervolgens de Firesafe (F) aan de zuurstofslang (D). De pijl op de Firesafe wijst richting het gezicht van de gebruiker.
- › Gebruik verder geen slangkoppelingen; deze kunnen de werking van het systeem nadelig beïnvloeden.

5

Neusbril aansluiten

- › Plug de neusbril in de Firesafe (F).
- › Zorg dat de neusbril (J) ongeveer 10 cm vrij hangt van de vloer.

6

Plug nu de zuurstofslang in uw concentrator en uw Oxyrunner® systeem is klaar voor gebruik!

