

Oxyrunner[®]

Veiliger bewegen
met een zuurstofslang.

Westfahlen
Medical



De Oxyrunner®

Samen sterk tegen incidenten

Van een patiëntidee naar een professionele standaard.

De Oxyrunner® is meer dan een product; het is een innovatief maatschappelijk project met een heldere missie: het drastisch verminderen van valincidenten en het verbeteren van de levenskwaliteit van kwetsbare patiënten.



Ontstaan vanuit de praktijk: een bijzondere oorsprong.

De kracht van de Oxyrunner® ligt in zijn authentieke ontstaansgeschiedenis. Dit hulpmiddel is niet bedacht achter een tekentafel, maar ontstaan uit pure noodzaak in de dagelijkse praktijk.

De allereerste versie werd uitgevonden door een zuurstofpatiënt zelf. Met bewonderenswaardige inventiviteit bouwde hij het eerste prototype simpelweg van hout en tiewraps. Hij wist als geen ander wat er nodig was om veilig te bewegen. Wij zagen de enorme potentie van dit eerlijke idee. Westfalen Medical heeft dit ruwe concept omarmd en professioneel doorontwikkeld tot de hoogwaardige, veilige en betrouwbare oplossing die er vandaag de dag staat.



Onze missie: veiligheid voorop

Het initiatief is

voortgekomen uit de urgente behoefte om patiënten met een verhoogd valrisico beter te beschermen. Samen met onze partners streven we naar een wereld waarin deze patiënten zich veiliger en zelfverzekerder kunnen bewegen. Het primaire doel staat bij elke beslissing centraal: valpreventie en bewegingsvrijheid.



Een uniek model: maatschappelijk en professioneel

Wat de Oxyrunner uniek maakt, is het maatschappelijk project. Westfalen Medical heeft bewust gekozen voor een aanpak zonder winstoogmerk.



100% focus op het doel

Er wordt geen financiële winst nagestreefd door Westfalen Medical. De Oxyrunner® wordt tegen een zo laag mogelijke prijs geleverd.



Krachtige samenwerking

De Oxyrunner® is het resultaat van een

krachtige samenwerking tussen diverse partijen. Iedereen brengt zijn eigen expertise in, verbonden door dat ene gemeenschappelijke doel: zorgdragen voor een veiliger leven.

Inhoud

- 2 De Oxyrunner®
- 2 Samen sterk tegen incidenten
- 4 Inhoud
- 6 Wat is de Oxyrunner®
- 8 Bewegingsvrijheid
- 10 Heeft u nog vragen?



Wat is de Oxyrunner®

Bent u zuurstofpatiënt en vindt u de zuurstofslang over de vloer ook zo hinderlijk? Jarenlang was het een vervelende en onveilige bijkomstigheid voor zuurstofgebruikers. Maar eindelijk is er nu een oplossing: de Oxyrunner®, het unieke zuurstofslang-ophangstelsel langs het plafond.

De oplossing

Het product in houten vorm, met tiewraps en een koordje, werd jarenlang gebruikt door de uitvinder van de Oxyrunner®, zelf zuurstofpatiënt. Te mooi voor alleen eigen gebruik, vond hij. Dat vonden wij ook. We ontdekten een kinderlijk eenvoudige, maar fantastische oplossing waar u als zuurstofpatiënt écht baat bij hebt.

Daarom hebben wij de Oxyrunner® niet alleen in ons assortiment opgenomen, maar het concept ook intensief verder doorontwikkeld. We hebben het authentieke houten ontwerp vertaald naar moderne technologie. Dit heeft geresulteerd in versie 2.0: een volledig 3D-geprint model. Hiermee is de slimme vindingrijkheid van de patiënt omgezet in een professioneel en duurzaam hulpmiddel.



Valpreventie

De Oxyrunner® zorgt ervoor dat patiënten zich binnenshuis veel vrijer en veiliger kunnen bewegen. Een zuurstofslang over de vloer is niet alleen onhandig, maar vormt ook een reëel struikelgevaar met alle vervelende gevolgen van dien. De Oxyrunner® elimineert dat gevaar en biedt een uitstekende oplossing voor valpreventie. Bovendien voorkomt het systeem dat de zuurstofslang achter allerlei obstakels blijft haken.



Onveilige situatie met struikelgevaar.




Met de Oxyrunner® is dat verleden tijd!



Bewegingsvrijheid

Een nieuwe kijk op veiligheid en bewegingsruimte. Eenvoudig en innovatief met een grote impact op kwaliteit van leven. Want niet alleen de veiligheid is een prachtige eigenschap, het geeft u veel meer vrijheid. Slim, doordacht en makkelijk te installeren. Een must have voor elke zuurstofpatiënt.

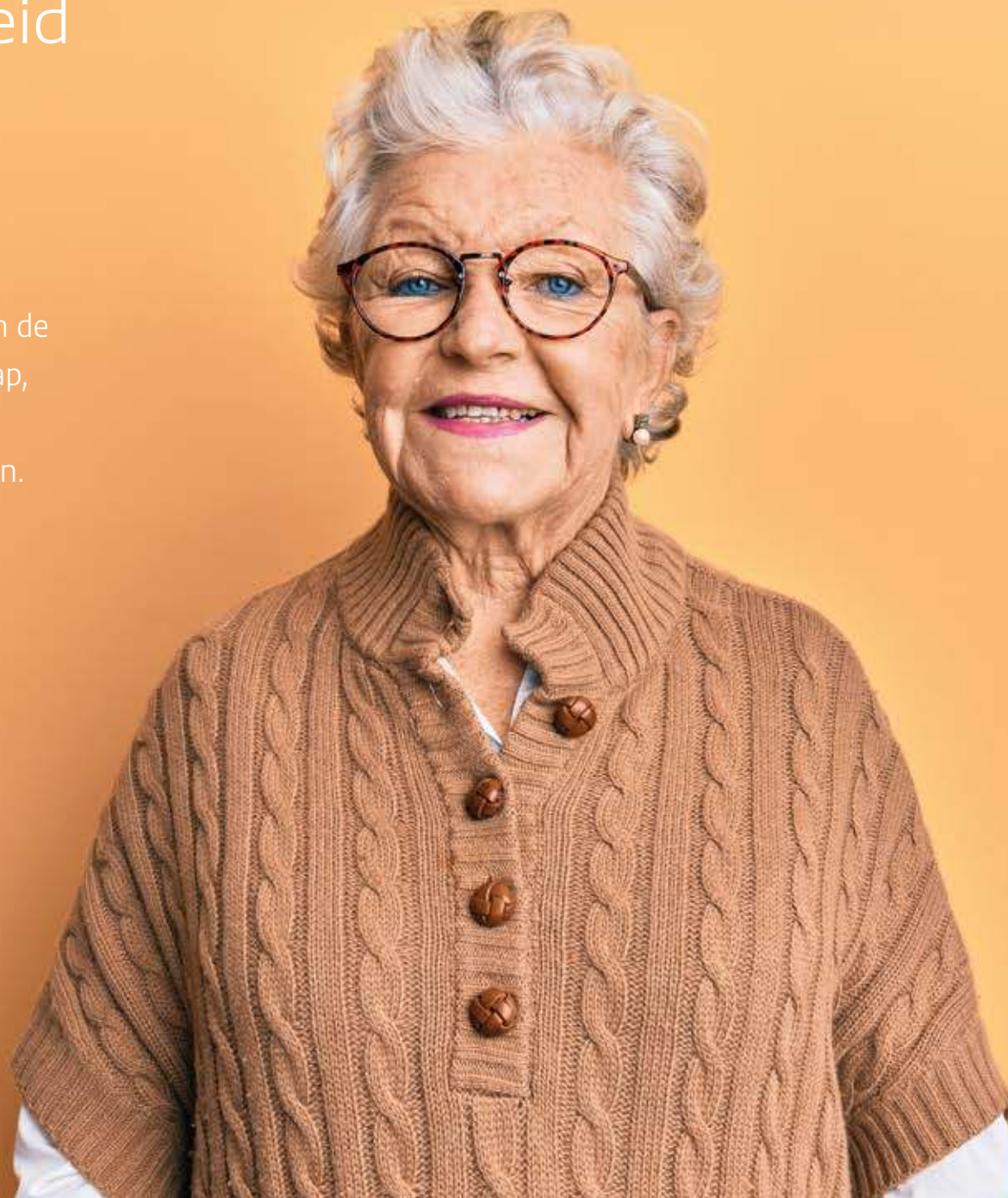

Zuurstof via katrolletjes

Een gordijnrail aan het plafond. De Runners aan de rail zorgen voor de geleiding van de zuurstofslang op een manier die spanning op de slang uitsluit. Vanaf elk punt op de rail heeft u ongeveer 3,5 meter speelruimte naar links en naar rechts. Het systeem kan in meerdere vertrekken worden geïnstalleerd. De rail kan tot maximaal 11 meter lengte in een vertrek geplaatst worden. Met een lengte tot 19 meter zuurstofslang heeft u alle bewegingsruimte die u wenst. U kunt de concentrator daardoor ook in een ander vertrek plaatsen waardoor u geluid minder tot niet niet hoort.



Laten installeren

Wij bieden ook de mogelijkheid tot installatie door een gecertificeerd partner. En als u wilt, adviseren wij u over de 'looproute' van de rails, voor uw maximale mobiliteit.

Wilt u ook genieten van de vrijheid en veiligheid van de Oxyrunner®? Het aanvragen van een offerte via onze website is heel eenvoudig.

Alles wat we nodig hebben is een aantal foto's van de thuissituatie, de lengte, breedte en hoogte van uw vertrek en bestellen met- of zonder installatie.

U ontvangt daarna een offerte en bij akkoord zetten wij de bestelling in gang.



Heeft u nog vragen?

Wij bieden u diverse mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Op onze website geven wij bijvoorbeeld antwoord op veelgestelde vragen. Vindt u niet wat u zoekt neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn er voor u.

Contactgegevens

Tel. 0570 - 858 404

oxyrunner@westfalen.com


westfalenmedical.com

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08.00 uur tot 17.00 uur



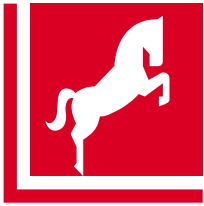

Westfalen Medical BV

Rigastraat 14
7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 858 404
oxygenrunner@westfalen.com
westfalenmedical.com

Westfalen
Medical