



Philips Oxygenate 5

Gebruiks- en onderhoudsinstructies

Westfalen
Medical



Philips Oxygenate 5

De Philips Oxygenate 5 kenmerkt zich als een moderne en betrouwbare stationaire zuurstofconcentrator voor thuisgebruik. Deze concentrator biedt een continue zuurstoftoevoer van 0,5 tot maximaal 5 liter per minuut.



Digitaal display


De Oxygenate 5 onderscheidt zich door een helder digitaal display en een zeer gebruiksvriendelijke bediening.




Laag geluidsniveau

Met <40 dB is de Oxygenate 5 één van de stilste zuurstofconcentratoren die er is.

1. Handgreep
2. Bedieningspaneel
3. Luchtinlaat

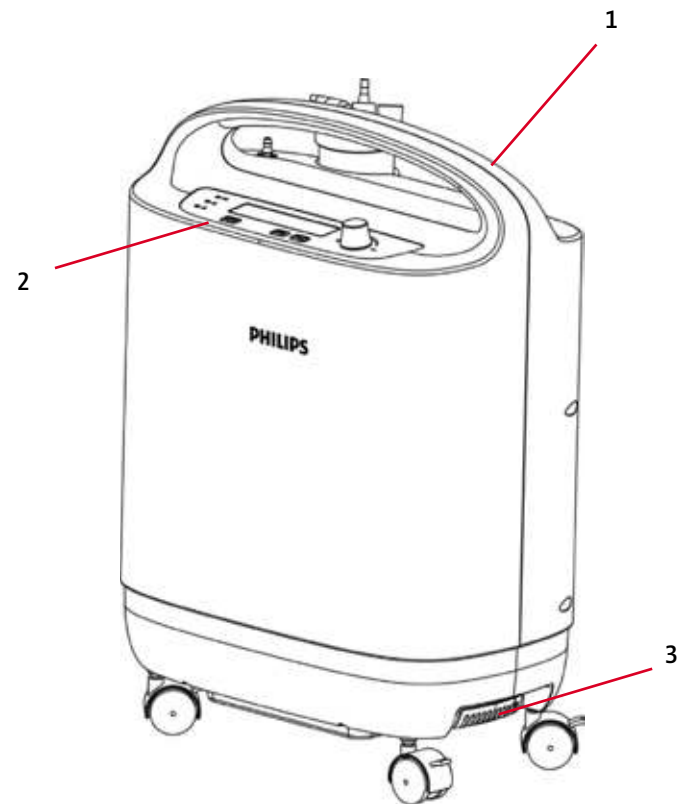

1. Led indicatoren
I/O Stroomindicator
⚠ Foutindicator
🔔 Alarmindicator
2. Aan/uit knop
3. Knoppen voor het instellen van de timer
4. Digitaal display
5. Flowknop (aantal liters per minuut)

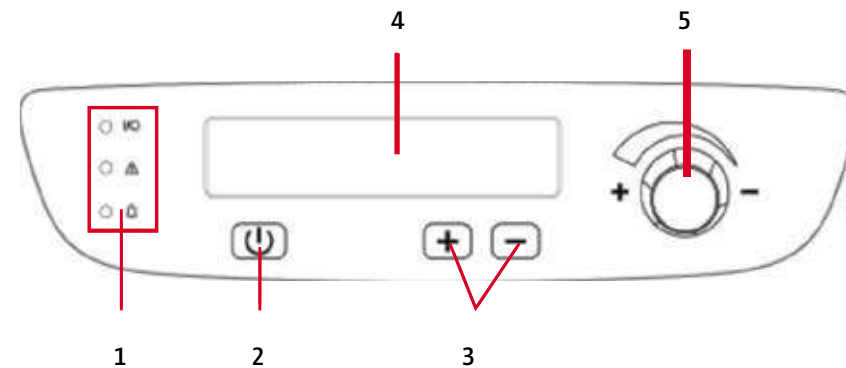

Tips voor gebruik en onderhoud

- › Lees de instructiekaart die u van ons heeft ontvangen goed door.
- › Roken en open vuur zijn altijd streng verboden. Dit geldt ook voor het gebruik van e-smokers en vapes.
- › Plaats het apparaat ongeveer 30 centimeter van de muur, meubels en gordijnen af.
- › Plaats het apparaat niet onder een kapstok. Dit in verband met zuurstofverzadiging.
- › Zorg er altijd voor dat het filter is geplaatst voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- › Het filter aan de onderzijde van de concentrator moet wekelijks gereinigd worden. Dit doet u door het filter uit het apparaat te halen en te stofzuigen.
- › Reinig het apparaat wekelijks met een licht vochtige doek met eventueel een mild afwasmiddel.
- › Wij adviseren de neusbril wekelijks te vervangen.



Productspecificaties Philips Oxygenate 5

Gewicht	18 kg
Afmetingen L x B x H	41 x 26,5 x 53 cm
Geluidsniveau	< 40 dB
Flowbereik	0,5 – 5 L/min
Stroomtoevoer	230 V – 50 Hz
Verbruik per uur	0,36 kw/uur
Verbruik per dag	8,64 kw



Probleem	Alarm	Oplossing
De netwerkstroom wordt tijdens het gebruik losgekoppeld.	Led: Rood en snel knipperend. Geluid: Pieptonen 3-2-3-2.	Schakel de concentrator uit door de schakelaar aan de achterzijde op UIT te zetten en trek de stekker uit het stopcontact. Stop de stekker weer in het stopcontact en zet de schakelaar aan de achterzijde weer op AAN. Heeft u nog geen stroom? Gebruik dan een ander stopcontact. Controleer bij nog steeds geen stroom de meterkast of er stroom op het stopcontact staat. Heeft de concentrator dan nog steeds geen stroom, bel dan Westfalen Medical.
Te lage zuurstof-concentratie.	Led: Geel en constant. Geluid: Enkele pieptoon.	Schakel de concentrator uit. Maak de filters schoon en zorg voor een goede ventilatie, zoals is beschreven op de ventilatiewijzer. Laat het apparaat afkoelen. Zet de concentrator weer aan en kijk op welke flowinstelling de concentrator is ingesteld. Blijft de melding aanwezig, neem dan contact op met Westfalen Medical.
Ongewone luchtdruk.	Led: Geel constant Geluid: Enkele pieptoon Melding: E02 (te lage druk) of E05 (te hoge druk).	Schakel de concentrator uit. Maak de filters schoon en zorg voor een goede ventilatie, zoals is beschreven op de ventilatiewijzer. Controleer en zorg ervoor dat de lucht uit- en inlaat schoon en vrij is van verstoppingen. Zet de concentrator weer aan. Blijft de melding aanwezig, neem dan contact op met Westfalen Medical.

Probleem	Alarm	Oplossing
Te hoge temperatuur.	Led: Geel constant Geluid: Enkele pieptoon Melding: E35	Schakel de concentrator uit. Maak de filters schoon en zorg voor een goede ventilatie, zoals is beschreven op de ventilatiewijzer. Laat het apparaat afkoelen. Zet de concentrator weer aan. Blijft de melding aanwezig, neem dan contact op met Westfalen Medical.
Geen signaal van de zuurstofsensor.	Led: Geel constant Geluid: Enkele pieptoon Melding: E31	Neem contact op met Westfalen Medical.
Te lage stroomspanning.	Led: Geel constant Geluid: Enkele pieptoon Melding: E03	Schakel de concentrator uit. Maak de filters schoon en zorg voor een goede ventilatie, zoals is beschreven op de ventilatiewijzer. Laat het apparaat afkoelen. Zet de concentrator weer aan. Blijft de melding aanwezig of start hij niet op, neem dan contact op met Westfalen Medical.



Heeft u nog vragen?

Wij bieden u diverse mogelijkheden om antwoord te krijgen op uw vraag. Zo hebben we op onze website antwoord gegeven op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

Contactgegevens

Tel. 0570 - 858 450
info@westfalenmedical.nl
westfalenmedical.com

Bestellen van producten

Stuur een e-mail met
uw bestelling naar
bestellen@westfalen.com.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08.00 uur tot 18.00 uur

Bereikbaarheid buiten openingstijden

Tel. 0570 – 858 450
(uitsluitend voor spoedgevallen)



Westfalen Medical BV

Rijgstraat 14
7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 858 450
info@westfalenmedical.nl
westfalenmedical.com

Westfalen
Medical