



Gebruiksaanwijzing

Instructies wanneer koppelstukje van het masker is achtergebleven in de slang.

Het kan soms gebeuren dat het nieuwe masker niet in de slang past of dat het masker niet in de nieuwe slang past. U kunt zien of voelen dat er een onderdeelje van het koppelstukje is achtergebleven in de slang. Dit is snel te verhelpen.

Hieronder volgen instructies om dit probleem zelf op te kunnen lossen, zodat het masker en slang weer goed gekoppeld kan worden.

- 1** U ziet een rand in de binnenkant van de slang.



- 2** Koppel het masker opnieuw in de slang en druk deze goed aan.



- 3** Het masker is nu goed gekoppeld aan de slang.



- 4** U kunt nu met een zogenaamde breekbeweging het masker ontkoppelen van de slang.



- 5** Het koppelstukje van het masker plopt nu uit de slang.

